


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
APLIKÁTOR DROP BY DROP		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	G2DCD

Popis výrobku:

Katétr s koncovkou Luer, spojen se zkosenou tupou jehlou pro výhradní použití chirurgického lepidla GLUBRAN 2. 2,5ml Luer stříkačka se zkosenou tupou jehlou

Návod:

Výrobek je určen na jedno použití, a to výhradně pro chirurgické lepidlo GLUBRAN 2. Ve sterilních podmínkách, vyjměte stříkačku s jehlou z obalu a nasajte chirurgické lepidlo GLUBRAN 2 z lahvičky. Odstraňte jehlu a připojte ji na katétr a několikrát stiskněte píst dokud se lepidlo nezačne objevovat na hrotu jehly.

Materiál:

PVC, polypropylen, polystyren

Kód:

G2 – DCD – 210 – 8t

Sterilizace:

Záření gama

Trvanlivost:

5 let

Balení:

Sterilní obal

Skladování:


Přípravek uchovávat v původním obalu, na suchém místě při teplotě do 30 °C.

Směrnice:

MDD/93/42/EEC

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
APLIKÁTOR DROP BY DROP		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	G2DCD

Třída:

IIa.

Balení:

1 ks

Označení:

STERILE|EO

CE 0373

Datum revize: 18.5.2009**Výrobce:****G.E.M.**

Via dei Campi, 2 - PO Box 427

Viareggio, LU, 55049

www.gemitaly.it**Distributor:**
... intenzivní péče**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!