


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO SET, 72 HODIN		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/4	Viz. níže

Popis výrobku:

- pro dospělé, napojení na endotracheální kanylu Ch 10 – 16, délka 54 cm
- pro dospělé, napojení na tracheostomickou kanylu Ch 12 – 16, délka 34 cm
- s 12 ampulemi 0,9% NaCl
- obsah ampule 15 ml
- doporučená doba použití 72 hodin

Opiflo 72 set pro dospělé, napojení na endotracheální trubici

Katalogové číslo:	Ch	Délka hadice (cm)
43.004.59.610	10	54
43.004.59.612	12	54
43.004.59.614	14	54
43.004.59.616	16	54

Opiflo 72 set pro dospělé, napojení na tracheotomickou kanylu

Katalogové číslo:	Ch	délka hadice (cm)
43.004.59.613	Ch12	34
43.004.59.615	Ch14	34
43.004.59.617	Ch16	34


Pokyny

1. Nemýt a neoplachovat.
2. Nenasazovat déle než na 72 hodin.
3. Nesterilizovat opakovaně.
4. HME filtr při oplachování odstraňte.

Nasazení

1. Balení otevírejte za hygienických podmínek.
2. Odstraňte ochrannou klapku na odsávacím portu.
3. Odsávací systém nasad'te na odsávačku.
4. Nastavte požadovaný výkon odsávání.
5. Odstraňte rohový adaptér na dýchacím systému.
6. Nasad'te odsávací systém na endotracheální tubus nebo na tracheální kanylu.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO SET, 72 HODIN		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/4	Viz. níže

7. Spojte dýchací systém s odsávacím systémem.
8. Přelepte náplastí.

Instrukce pro použití

1. Informujte pacienta a aplikujte kyslík.
2. Nastavte sací účinek s požadovaným výkonem.
3. Katétr zaveďte až do požadované hloubky.
4. Zaveďte pomocí ovládní odsávacího ventilu průběh odsávání.
5. Táhněte katétr zpět pod sáním.
6. Pro čištění špičky katétru instilujte proplachovací roztok při zataženém katétru a pod sáním.
7. Pro bronchiální laváž instilujte zavedeným katétrek vyplachovací tekutinu.

NaCl, INHALAČNÍ ROZTOK (0,9%)

Indikace:

Obsah ampulek slouží k jednorázovému použití v respirační terapii a pro tracheální laváž. Obsah ampule je sterilní a nepyrogenní. Neobsahuje žádné bakteriostatické činitele.

Kontraindikace:

Nejsou známy.


Varování

Není určeno k injekčnímu použití nebo pro přípravu injekčních roztoků. Nepodávejte parenterálně.

Dávkování:

Dle pokynů lékaře.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO SET, 72 HODIN		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 3/4	Viz. níže

Návod k použití:

Před použitím zkontrolujte, zda je ampule neporušená. Lehce ampulku stiskněte, zda s ní nevytéká obsah. Ampulka by se poté měla vrátit do původního tvaru, což je známka vnitřního tlaku v uzavřené ampulce. Odломte vrchní část ampulky a vytlačte požadovaný objem. Nepoužitý zbytek obalu zlikvidujte stejně tak nepoužitý roztok v nádobce nebulizátoru..

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě
 Nevystavujte vysokým teplotám
 Chraňte před mrazem

Označení:


STERILE EO

CE 0123

Datum revize textu: 19. 01. 2010

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO SET, 72 HODIN		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 4/4	Viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!