


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
GELOVÉ PODLOŽKY		Katalogové číslo
P - Gelové podložky	Počet stran: 1/3	Viz níže

Popis výrobku:

OKL ®zdravotní polohovací podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerového gelu. Jsou měkké, protiskuzové a rovnoměrně rozkládají tlak těla, čímž poskytují velmi efektivní ochranu proti proleženinám. Podložky neobsahují latex a nemají žádné nepříznivé účinky.

Název	Katalogové číslo	Rozměry
Podložka pod hlavu obličejem dolů	1101-1	28x24x14
	1101-2	25x20x10
Kruhová podložka hlavy	1102-2	20x7x5
	1102-4	10x4x2,5
	1102-5	8x3x2
Podložka pod hlavu – podkova	1103-2	20x7x5
	1103-4	8x3x2
Podložka pod hlavu s bočním vedením	1105-1	23x23x4
	1105-2	22x19x6
Kónická podložka hlavy - podkova	1108-2	14x3,5
Kruhová podložka hlavy - kisoidea	1109-1	20x7x4-1,5
Kvádrová podložka	3109-4	20x12x10
Univerzální podložka - půlválec	4101-2	30x10x4
Podložka pod patu	4103-1	18x10x7

OKL ®zdravotní polohovací podložky zajišťují během operace širokou možnost polohování zároveň s komfortem a stabilitou pacientů. Snižují délku operace, maximálně redukuje a odstraňují tlak podložky na části těla, čímž zabraňují poškození tkání a nervů.


Upozornění:

Zacházejte s podložkami opatrně, nikdy netrhejte okraje a podložky příliš nenapínejte.

Zabraňte styku podložky s tvrdými a ostrými předměty.

OKL ®zdravotní polohovací podložky mají vysokou tepelnou kapacitu. V případě delší operace podložku předem nahřejte, aby byla minimalizována ztráta tepla pacienta.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
GELOVÉ PODLOŽKY		Katalogové číslo
P - Gelové podložky	Počet stran: 2/3	Viz níže

OKL @zdravotní polohovací podložky mohou být přehřívány v horké vodě, jejíž teplota nesmí přesahovat tělesnou teplotu (37°C); provozní teplota podložky je od -10 do + 45 °C.

OKL @zdravotní polohovací podložky jsou nevodivé a mohou být využity při rozmanitých elektrochirurgických zákrocích. V případě vysokofrekvenčních elektrochirurgických zákroků nesmí být pacient uzemněn. Hrozí riziko závažného poranění (např. popálenin).

Použití vysokofrekvenčního přístroje konzultujte s odborníkem operačního oddělení a dodržujte instrukce v uživatelské příručce přístroje.

OKL @zdravotní polohovací podložky propouští rentgenové paprsky. V případě použití RTG umístěte podložku vždy mezi zdroj záření a pacienta, abyste u pacienta snížili dávku radiace.


OKL @zdravotní polohovací podložky by měly být skladovány na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.

OKL @zdravotní polohovací podložky jsou voděodolné. Dezinfikujte běžnými vlhkými i studenými desinfekčními prostředky. Povrch podložky může být čištěn čistou vodou nebo desinfekčními prostředky. Může být použit alkohol, ale vyhněte se použití jodových prostředků. Není doporučována dezinfekce plynem, autoklávování ani dlouhodobé namáčení podložky.

Oprava podložky:

K opravě podložky lze použít záplaty na opravy podložek. Před aplikací záplaty podložku očistěte a řádně osušte, zbytky po použití náplasti můžete odstranit hadříkem navlhčeným minerálním olejem. Zbytky minerálního oleje očistěte teplou vodou se saponátem a důkladně vysušte. Pozorně změřte poškozenou oblast a ustříhňte opravnou pásku tak, aby záplata přesahovala 0,8 cm na každé straně poškozené části. Opatrně oddělte polovinu opravné pásky a nalepte na poškozenou oblast. Poté nalepte druhou polovinu pásky. Jakékoliv vzduchové bubliny by měly být před opětovným použitím podložky odstraněny.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
GELOVÉ PODLOŽKY		Katalogové číslo
P - Gelové podložky	Počet stran: 3/3	Viz níže

Záruka:

Při správné manipulaci s podložkou je garantována záruční lhůta 5 let.

Balení:

1 ks

Datum revize textu: 14. 01. 2010

Výrobce:



Auckland Medical Polymer

ZhongXing Road, CaiTai, XiQing District, Tianjin
China

<http://www.okltj.com>

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!