

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>GLUBRAN TISS</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/3	G-NBOC

### Specifikace:

Lepidlo na pokožku GLUBRAN TISS je zdravotnický přípravek tř. II a pro lokální použití. GLUBRAN TISS splňuje Direktivu EU 93/42 EEC. Jedná se o sterilní kyanoakrylátové lepidlo na pokožku, připravené k okamžitému použití. Má slabě žlutou barvu a v kontaktu s tkání rychle polymeruje. Při polymeraci vytváří tenkou elastickou voděodolnou vrstvu pevně ulpívající k pokožce s velkou pevností v tahu. Lepidlo začíná lepit ihned po aplikaci. Po polymeraci získává antimikrobiální vlastnosti.

### Složení:

NBCA (n-butyl 2 kyanoakrylát)

OCA (2-oktyl kyanoakrylát)

### Použití:

Otevřete blister a vyjměte ampulku. Před použitím se přesvědčte, že je obsah ampule průhledný. Pokud je lepidlo husté a/nebo zkalené, přípravek nepoužívejte. Lepidlo aplikujte ihned po otevření ampule. Nikdy jej neaplikujte přímo do rány, pouze na předem očištěné a osušené okraje vnějšího povrchu rány. Po aplikaci lepidla přidržte na cca 1 minutu okraje rány u sebe, dokud lepidlo nezaschne. Po polymeraci již nelze výsledný efekt nijak upravit. K samovolnému odloučení lepidla dojde po 3-5 dnech.

1. Přidržujte ampuli ve vertikální poloze hrdlem vzhůru.
2. Kapičky, ulpívající v hrdle ampule, nechte stéct dolů.
3. Na hrdlo ampule našroubujte aplikátor. Před aplikací se přesvědčte, že je aplikátor bezpečně upevněn. Nadměrný tlak na tělo ampule způsobuje odkapávání lepidla špičkou aplikátoru.
4. Otočte ampuli a jemně ji stiskněte, aby se na špičce aplikátoru objevila kapka lepidla.
5. Aplikujte na ránu malé množství lepidla. Ampuli pouze jemně stiskněte. Aplikace přílišného množství lepidla má za následek delší dobu polymerace, nižší pevnost v tahu a prodloužení doby hojení.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>GLUBRAN TISS</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/3	G-NBOC

### **Kontraindikace:**

Nikdy lepidlo neaplikujte přímo do rány, ale pouze na předem očištěný a osušený vnější povrch rány.

Nepoužívejte u hypersenzitivních pacientů.

Nepoužívejte na infikované a chronické rány.

### **Pozor:**

Vždy aplikujte pouze malé množství lepidla. Druhou vrstvu lepidla je možné nanést až na polymerovanou první vrstvu. Nadměrné množství lepidla je možné během 5-6 sekund odstranit suchým tampónem. Při zasažení očí okamžitě oči vypláchněte vodou. Pokud lepidlo již polymerovalo, dojde k jeho přirozenému odloučení po 2-3 dnech. Lepidlo, které ulpělo na chirurgických nástrojích, je možné odstranit acetonem.

### **Varování:**

Lepidlo smějí aplikovat pouze náležitě vyškolení lékaři. Lékař je zodpovědný za správné použití produktu. Nepoužívejte, pokud je obsah ampule hustý a/nebo zakalený.

Lepidlo je určeno k jednorázovému použití. Nepoužitý zbytek lepidla zlikvidujte.

Ve velmi vzácných případech může dojít k lokálnímu zanícení. Exotermická reakce polymerace (vždy méně než 45 °C) může u senzitivních pacientů, jako jsou děti nebo starší lidé, vyvolat lehký pocit pálení.

### **Skladování:**

Výrobek je nutné skladovat při teplotě 0 až +4 °C

### **Exspirace:**

Při správném skladování je výrobek možné použít do dvou let od data výroby. Po tomto datu výrobek nepoužívejte.

### **Balení:**

1/10 ks

### **Označení:**

**STERILE|EO**

**CE** 0373

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>GLUBRAN TISS</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 3/3	G-NBOC

**Datum revize: 18.5.2009**

**Výrobce:**



**G.E.M.**

Via dei Campi, 2 - PO Box 427

Viareggio, LU, 55049

[www.gemitaly.it](http://www.gemitaly.it)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**