

Snadno se přihodí,  
**rychle se zahojí**



[www.flamigel.cz](http://www.flamigel.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče



Dodavatel: **DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r. o., Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
info@dahl.cz • [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

## POPÁLENINY

### **Princip:**

Flamigel je hydroaktivní gel. Podporuje proces hojení, tvorbu nové tkáně a zacelení kůže. Příjemně chladí a zklidňuje pokožku.

### **Způsob použití:**

**Povrchové popáleniny a popáleniny způsobené sluncem.**

Opatrně rozetřete Flamigel na postižené místo a nechte působit k zajištění chladivého a uklidňujícího účinku. Nevírejte do kůže.

Aplikujte 1 - 2x denně, v případě popálení sluncem 2 - 6x denně.

### **Otevřené rány a popáleniny:**

1. Vymyjte a vyčistěte ránu.
2. Vysušte ránu pomocí sterilního tampónu.
3. Naneste silnou vrstvu min. 5mm Flamigelu na ránu, snažte se vyhnout okolí rány. V případě hluboké rány vyplňte zhruba 2/3 objemu rány Flamigelem.
4. Překryjte mastným tylem a převažte obvazem nebo překryjte transparentní polyuretanovou folií (k dostání v lékárnách nebo na [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)).
5. Zachovejte Flamigel na místě co nejdéle, dokud struktura gelu zůstává neporušená.

### **Popáleniny/odřenin, řezné rány a pořezání:**

Krytí obnovujte každých 24 hodin.

### **Proleženiny:**

Rány černé a žluté převazujte každých 24 až 48 hodin.

Rány červené převazujte každé 2 až 3 dny.

**Flamigel** je k dostání v lékárnách a v distribuci společností Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s., Alliance UniChem CZ, spol. s r.o., Pharmos, a.s. a v databázi společnosti Pharmdata.