


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>KYSLÍKOVÉ BRÝLE PRO DĚTI TYP 601, 602</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

**Popis výrobku:**

Trojlístkové lumen proti zalomení, hadice zakončená trychtýřem.

Fixace přes uši. 210 cm přívodní hadice.

Katalogové číslo	Typ	Věk
01.000.01.601	601	do 1 roku
01.000.01.602	602	nad 1 rok

**Postup:**

1. Opatrně zaveďte nosní hadičky (sondy) do nosních dírek.
2. Hadičky ved'te nad ušima a pak podél plastového posuvného dílu směrem ke krku, až dosáhnete pohodlné polohy pod bradou.
3. Nastavte průtok kyslíku na stupeň předepsaný lékařem.
4. Připevněte kyslíkovou hadici na zdroj kyslíku.

**Balení:**

50 ks

**Označení:**

**C € 0123**

Revize č. 0 :22.9.2011

**Výrobce:**

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)