


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>KYSLÍKOVÉ BRÝLE PRO DOSPĚLÉ TYP 750, 319</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

**Popis výrobku:**

Trojlístkové lumen proti zalomení, hadice zakončená trychtýřem.

Fixace přes uši. Přívodní hadice dle typu.

Katalogové číslo:	Typ	Délka přívodní hadice
01.000.01.750	750	210 cm
01.000.00.319	319	420 cm

**Postup:**

1. Zaveďte opatrně nosní sondy do nosních dírek.
2. Hadičky ved'te za uši, potom posouvejte plastovou svorku proti krku, až docílíte pohodlné polohy pod bradou.
3. Nastavte tlak kyslíku na hodnotu předepsanou lékařem.
4. Připojte kyslíkovou hadici ke zdroji kyslíku.
5. Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.

**Balení:**

50 ks

**Označení:**

 **0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**