


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KYSLÍKOVÁ MASKA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

Popis výrobku:

Kyslíková maska pro dospělé a děti. Transparentní.

Katalogové číslo:	Délka přívodní hadice	Určeno pro	Balení
01.000.08.110	210 cm	dospělé	50 ks
01.000.08.115	bez přívodní hadice	dospělé	50 ks
01.000.01.122	210 cm	děti	50 ks
01.000.08.130	210 cm	dospělé + rezervoár vak	25 ks

Postup:

1. Připojte důkladně kyslíkovou hadici ke zdroji kyslíku.
2. Opačný konec hadice připojte ke koncovce masky.
3. Nastavte tlak kyslíku na hodnotu stanovenou lékařem.
4. Umístěte masku na pacientův obličej tak, aby kryla ústa i nos.
5. Natáhněte fixační gumičku přes hlavu pacienta pod ušima na krk.
6. Zajistěte pozici masky přitažením fixační gumičky.
7. Zformujte měkký kovový pásek kolem nosu pacienta.
8. Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.

Označení:

C € 0123

Revize č. 0 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!