


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>NEBULIZÁTOR TYP 900</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Anesteziologie - A</b>	<b>Počet stran: 1/1</b>	01.000.08.900

### Popis výrobku:

Nebulizátor do ventilačních okruhů. S náustkem a 15 cm výdechovou vrapovanou hadicí. Zakončení trychtýř – trychtýř. Velikost částic aerosolu 5 – 10 mm.

### Postup:

1. Odšroubujte víčko nebulizátoru a aplikujte předepsaný medikament.
2. Víčko opět zašroubujte.
3. Nasuňte nebulizátor do dolní části „T“ spojky, nasadte náustek do jednoho ramene T kusu, do opačného konce nasuňte výdechovou vrapovanou trubici
4. Zdroj kyslíku nebo stlačeného vzduchu propojte s nebulizátorem důkladným nasunutím konce přívodní hadice na trn ve spodu nebulizátoru až na doraz, seřídte průtok na max.7 l/min. (doporučený průtok 5 l/min.)
5. Vložte náustek do úst pacienta a řiďte se pokyny lékaře.
6. Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.

### Balení:

50 ks

### Označení:

 **0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

### Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)