


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NEBULIZÁTOR TYP 753, 924		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

Popis výrobku:

Nebulizátor do ventilačních okruhů. S maskou. Velikost částic aerosolu 5 – 10 mm.

Katalogové číslo	Typ	Délka přívodní hadice	Ukončení
01.000.08.753	753	210 cm	Bezpečnostní závit - trychtýř
01.000.08.924	924	210 cm	Trychtýř - závit

Postup:

1. Odšroubujte kryt spodní části a přidejte předepsaný lék.
2. Díly opět spojte.
3. Masku připevněte na určený otvor.
4. Jeden konec hadice připojte na připojovací místo rozprašovače a druhou část na připojovací místo zdroje kyslíku nebo tlakového vzduchu.
5. Přiložte masku na obličej a dále se řiďte pokyny lékaře.

Balení:

50 ks

Označení:

 **0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz