


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SOUPRAVA NA ODBĚR TRACHEÁLNÍHO SEKRETU		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	07.098.00.000

Popis výrobku:

Netříštivá odběrná zkumavka 15 ml. Vložený fingertip. Přiložený šroubovací uzávěr a jmenovka pacienta.

Montáž

Na závitovém uzávěru zkumavky se nachází cca deseti centimetrová spojovací hadička s trychtýřem a přípojkou pro připojení na odsávací katétr. K vytvoření podtlaku slouží spojovací hadička s trychtýřem, na který se napojí sací hadička odsávacího zařízení, řízeného vakuem nebo vzduchovým tlakem.

Použití

Po zavedení odsávacího katétru do trachey se prstem uzavře přerušovač sání. Tím začíná průběh odsávání a bronchiální sekret začne plnit sterilní zkumavku. Po ukončení se závit napojené spojovací hadičky odpojí a za sterilních podmínek se zkumavka uzavře přiloženou zátkou. Sběrná zkumavka je tak připravena k přepravě a s průvodním popisem může být zaslána k bakteriologickému vyšetření.

Balení:

60/180 ks

Označení:

STERILE|EO

 **€0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz