


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BEZPEČNOSTNÍ LANCETA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	10.000.00.025

Popis výrobku:

Předem formovaná, jednorázová bezpečnostní lanceta.

Návod k použití:

1. Uchopte základní část (dávejte pozor, abyste nestiskli modré tlačítko).
Otáčejte bezpečnostním krytem ostří, až se rozlomí uzávěr a potom odstraňte víčko.
2. Konec válce umístěte pevně na zvolené místo a stiskněte modré tlačítko.

Po použití se jehla zatáhne automaticky zpět a lancetu není možné znovu použít.

Lancety likvidujte vždy do příslušné nádoby na ostré předměty nebo v souladu s místními předpisy o postupu likvidace.

Balení:

100/ 4000

Označení:



Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz