


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLEX SPOJKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

Flex spojka se používá k propojení ventilačního systému a endotracheální trubice nebo endotracheální kanyly.

15 M – 22 F

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.501.00.005	5
13.501.00.010	10
13.501.00.015	15
13.501.00.020	20

15 M – 15 F

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.502.00.005	5
13.502.00.010	10
13.502.00.015	15
13.502.00.020	20

s otočným portem pro bronchoskop 15 M

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.503.00.005	5
13.503.00.010	10
13.503.00.015	15
13.503.00.020	20

s otočným portem pro bronchoskop 22 F

STERILE|EO


Katalogové číslo:	délka(cm)
13.504.00.005	5
13.504.00.010	10
13.504.00.015	15
13.504.00.020	20

s proměnlivou délkou 15 M – 15 F

STERILE|EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.505.00.015	15
13.505.00.020	20

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLEX SPOJKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

s proměnlivou délkou a portem pro bronchoskop 15 M

STERILE EO

Katalogové číslo:	délka(cm)
13.506.00.015	15
13.506.00.020	20

Instrukce pro použití:

Zasunutím propojte vrapovanou hadici ventilačního systému s příslušným koncem Flex spojky, druhý konec napojte na ET trubici či kanylu. Přesvědčte se, zda-li je napojení provedeno důkladně a nedochází k úniku dýchací směsi.

Upozornění:

- Výrobek je dodáván sterilní v případě nepoškozeného obalu.
- Pro jednorázové použití.

Balení:

1/100 ks

Označení:

C E 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz