


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>EKG ELEKTRODY</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

### Popis výrobku:

V nabídce několik typů elektrod.

Katalogové číslo
19.000.00.110
19.000.00.112
19.000.00.114
19.000.00.405
19.000.00.440
19.000.00.459
19.000.00.460
19.000.00.558
19.000.00.457
19.000.00.462
19.000.00.505
19.000.00.916
19.000.00.715
19.000.01.405

### Instrukce pro použití:

Před použitím, obzvláště při zátěžovém EKG, doporučujeme pokožku očistit a odmastit. Dokonalého přilnutí k pokožce dosáhnete jemným přitlačením na celou plochu elektrody, včetně středového senzoru.

### Skladovací podmínky:

Nepoužité elektrody skladujte v uzavřeném obalu.


Po vyjmutí elektrody obal pečlivě uzavřete.

Nevystavujte elektrody zatížení tlakem ani zvýšené vlhkosti.

### Bezpečnostní opatření:

- Vždy dodržujte pokynů výrobce, aby bylo minimalizováno riziko popálenin.
- Elektrody neumísťujte na místa pokožky, která jsou postižena erytémem nebo lézemi a poraněními jakéhokoliv druhu.
- Nepoužívejte u pacientů, u kterých se objevily dráždivé reakce při kontaktu s elektrodou.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>EKG ELEKTRODY</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

- Nepoužívejte, pokud je gel suchý.
- Elektrody nepoužívejte po dobu delší než 24 hodin.

**Balení:**

300/3600 ks

**Označení:**

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:** **DAHLHAUSEN®****P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)**Distributor:** **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**