


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
INEX HADICE V HADICI		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:


Uzavřený dýchací okruh, hadice v hadici, 2 m.

Katalogové číslo	Průměr (mm)	150 cm	200 cm	300 cm	Zásobník O ₂	Bal./ ks
43.021.00.002	22		X			10
43.003.05.535	22	X				12
43.003.05.536	22		X			12
43.003.05.537	22	X				14
43.562.00.111	22		X		X	15
43.003.05.534	22			X		12
43.500.41.500	15	X				15

Poznámka: Průměr 22 mm pro dospělé. Průměr 15 mm pro děti.

Návod k použití:

- Dýchací okruh před použitím důkladně zkontrolujte a přesvědčte se, zda je vše připraveno pro správnou funkci. Pacient musí být v průběhu používání dýchacího okruhu monitorován.
- Napojte dle schématu níže výdechový konektor (A-flexibilní) a nádechový konektor (B-modře označený) k ventilátoru.

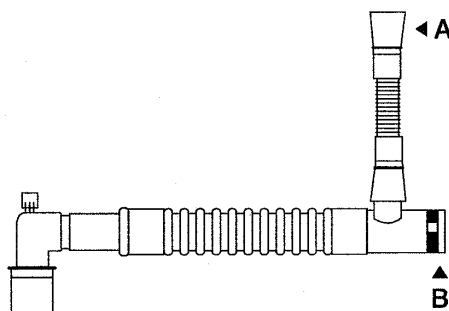

Balení:


Viz. tab.

Označení:

C **€** 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
INEX HADICE V HADICI		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!