


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO 72		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

UZAVŘENÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM.

Optiflo 72 pro děti

Katalogové číslo:	Ch	délka hadice (cm)
43.004.59.050	Ch5	31
43.004.59.060	Ch6	31
43.004.59.070	Ch7	31
43.004.59.080	Ch8	31

Opiflo 72 pro dospělé, napojení na endotracheální trubici

Katalogové číslo:	Ch	délka hadice (cm)
43.004.59.100	Ch10	54
43.004.59.120	Ch12	54
43.004.59.140	Ch14	54
43.004.59.160	Ch16	54

Opiflo 72 pro dospělé, napojení na tracheostomický set

Katalogové číslo:	Ch	délka hadice (cm)
43.004.59.121	Ch12	34
43.004.59.141	Ch14	34
43.004.59.161	Ch16	34


Pokyny

1. Systém nemyjte a neoplachujte.
2. Nepoužívejte déle než na 72 hodin.
3. Nesterilizujte opakovaně.
4. HME filtr při oplachování odstraňte.
5. Je-li plášť katétru poškozen, systém ihned vyměňte.

Nasazení

1. Systém použijte pouze, když je obal nepoškozen.
2. Balení otevřete za hygienických podmínek.
3. Odsávací systém nasadíte na odsávačku a zajistíte, aby neprobíhalo sání.
4. Nastavte požadovaný výkon odsávání.
5. Je-li to potřeba, nasadíte mezi odsávací systém a respirátor spojku nebo y kus.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OPTIFLO 72		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

6. Nasadíte odsávací systém na endotracheální tubus nebo na tracheální kanylu.
7. Spojíte dýchací systém s odsávacím systémem.
8. Přilepte štítek s datemem.

Instrukce pro použití

1. Informujte pacienta a aplikujte kyslík.
2. Nastavte sací účinek s požadovaným výkonem.
3. Katétr zaveďte až do požadované hloubky.
4. Proces odsávání spustíte otočením kontrolního ventilu odsávání.
5. Podtlakem zatáhněte katétrem zpět.
6. K čištění hrotu katétru použijte roztok (např. 0,9 % roztok NaCl). Při zataženém katéttru a pod sáním.
7. Pro bronchiální laváži použijte roztok (např. 0,9 % roztok NaCl) zavedeným katétrem.
8. Kontrolní odsávací ventil uzavřete otočením o 90 stupňů

Balení:

60 ks

Označení:

STERILE EO

C E 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz