


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>OPTIFLO SET, 72 HODIN</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/3	Viz. níže

### Popis výrobku:

- pro dospělé, napojení na endotracheální kanylu Ch 10 – 16, délka 54 cm
- pro dospělé, napojení na tracheostomickou kanylu Ch 12 – 16, délka 34 cm
- s 12 ampulemi 0,9% NaCl
- obsah ampule 15 ml
- doporučená doba použití 72 hodin

### Opiflo 72 set pro dospělé, napojení na endotracheální trubici

Katalogové číslo:	Ch	Délka hadice (cm)
43.004.59.610	10	54
43.004.59.612	12	54
43.004.59.614	14	54
43.004.59.616	16	54

### Opiflo 72 set pro dospělé, napojení na tracheotomickou kanylu

Katalogové číslo:	Ch	délka hadice (cm)
43.004.59.613	Ch12	34
43.004.59.615	Ch14	34
43.004.59.617	Ch16	34


### Pokyny

1. Nemýt a neoplachovat.
2. Nenasazovat déle než na 72 hodin.
3. Nesterilizovat opakovaně.
4. HME filtr při oplachování odstraňte.

### Nasazení

1. Balení otevírejte za hygienických podmínek.
2. Odstraňte ochrannou klapku na odsávacím portu.
3. Odsávací systém nasad'te na odsávačku.
4. Nastavte požadovaný výkon odsávání.
5. Odstraňte rohový adaptér na dýchacím systému.
6. Nasad'te odsávací systém na endotracheální tubus nebo na tracheální kanylu.

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>OPTIFLO SET, 72 HODIN</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Anesteziologie - A</b>	<b>Počet stran: 2/3</b>	Viz. níže

7. Spojte dýchací systém s odsávacím systémem.
8. Přelepte náplastí.

### **Instrukce pro použití**

1. Informujte pacienta a aplikujte kyslík.
2. Nastavte sací účinek s požadovaným výkonem.
3. Katétr zaveďte až do požadované hloubky.
4. Zaveďte pomocí ovládní odsávacího ventilu průběh odsávání.
5. Táhněte katétr zpět pod sáním.
6. Pro čištění špičky katétru instilujte proplachovací roztok při zataženém katétru a pod sáním.
7. Pro bronchiální laváž instilujte zavedeným katétrem vyplachovací tekutinu.

### **NaCl, INHALAČNÍ ROZTOK (0,9%)**

#### **Indikace:**

Obsah ampulek slouží k jednorázovému použití v respirační terapii a pro tracheální laváž. Obsah ampule je sterilní a nepyrogenní. Neobsahuje žádné bakteriostatické činidla.

#### **Kontraindikace:**

Nejsou známy.


#### **Varování**

Není určeno k injekčnímu použití nebo pro přípravu injekčních roztoků. Nepodávejte parenterálně.

#### **Dávkování:**

Dle pokynů lékaře.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>OPTIFLO SET, 72 HODIN</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 3/3	Viz. níže

### Návod k použití:

Před použitím zkontrolujte, zda je ampule neporušená. Lehce ampulku stiskněte, zda s ní nevytéká obsah. Ampulka by se poté měla vrátit do původního tvaru, což je známka vnitřního tlaku v uzavřené ampulce. Odlomte vrchní část ampulky a vytlačte požadovaný objem. Nepoužitý zbytek obalu zlikvidujte stejně tak nepoužitý roztok v nádobce nebulizátoru..

### Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě  
Nevystavujte vysokým teplotám  
Chraňte před mrazem

### Označení:

  **0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

### Distributor:

 **DAHLHAUSEN**  
...

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**