

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR TYP HEPA PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	43.009.05.100

Popis výrobku:

Pro umělou ventilaci pacientů, napojených na dýchací systém. Filtr se vřazuje mezi ET trubici a Y spojku, resp. In-ex hadici.

Doporučený přívodní objem:

Vyšší než 200 ml

Odpor:

0,5 l/s = 80 Pa

1,0 l/s = 190 Pa

Hmotnost:

32 g

Mrtvý prostor:

65 ml

Účinnost bakteriální a virová filtrace:

99,999%

CO₂ konektor:

ano

Připojení:

22/15 mm

Návod k použití:

Pro ochranu pacienta: zapojte filtr mezi ET trubici a Y spojku, resp. In-ex hadici.

Pro bakteriální ochranu: filtr může být vřazen přímo k ventilátoru. Před použitím zkontrolujte těsnost napojení konektorů, včetně luer uzávěru. Nastavte doporučený objem přívodního vzduchu.

Kontraindikace:

- Nepoužívejte pro dehydratované pacienty, pro pacienty s příliš silnou sekrecí a pro pacienty, u kterých hrozí riziko úniku ventilovaného vzduchu mimo filtr.
- Nedávkujte jiný než doporučený přívodní objem, zvětšení mrtvého prostoru může způsobit zvýšenou koncentraci CO₂ při nižším přívodním objemu než 200 ml.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR TYP HEPA PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	43.009.05.100

- Nepoužívejte v kombinaci s predehřátou nebulizací nebo zvlčením, nepřidávejte uměle do okruhu vlhkost

Upozornění:

- Používejte nejdéle 24 hodin nebo po kratší dobu, když to vyžaduje stav pacienta. Nahromadění většího množství sekretu způsobí sníženou prodyšnost a vyšší odpor při dýchání.
- V žádném případě nesterilizujte, funkčnost výrobku je po resterilizaci znehodnocen.
- Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití..
- Po použití zlikvidujte.

Balení:

50 ks

Označení:



Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!