


| | | |
|-------------------------------|------------------|---|
| NÁVOD K POUŽITÍ | |  DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče |
| Název výrobku: | | |
| UMĚLÝ NOS TYP 301, 302 | | Katalogové číslo |
| Anesteziologie - A | Počet stran: 1/2 | Viz. níže |

Popis výrobku:

Port pro přívod O₂. Transparentní. Typ 301 a 302.

| Katalogové číslo | Typ | membrána |
|------------------|-----|----------|
| 43.009.05.705 | 301 | ne |
| 43.009.05.706 | 302 | ano |

Použití:

Pro pacienty spontánně dýchající pomocí tracheostomické kanyly nebo endotracheální trubice v nemocniční nebo domácí péči. Není určeno k samostatnému použití bez dýchacího přístroje.

Doporučený přívodní objem:

50 – 1000 ml

Vnitřní objem:

17 ml

Ztráta vlhkosti:

VT = 250 ml : 8,5 mg/l

VT = 500 ml : 10,6 mg/l

VT = 750 ml : 13,0 mg/l

VT = 1000 ml : 17,0 mg/l

Tlakový odpor:

0,5 l/s : 0,15 cm H₂O

1,0 l/s : 0,30 cm H₂O

1,5 l/s : 0,50 cm H₂O

Hmotnost:

6 g

Rozměr:

29 mm

Připojení:

15 mm zásuvka, 5 mm přípojka pro přívod kyslíku membrána pro snazší nádech, výdech nebo pro odsávání.

Životní prostředí :


Likvidace spaláním vytváří uhlovodíky, CO₂, H₂O, CO

Návod k použití :

Umělý nos nasadíte na otevřený konec kanyly nebo endotracheální trubice. Zkontrolujte těsnost napojení. Pokud potřebujete připojit přívod kyslíku, použijte k napojení boční vstup.

Po několikerém nadechnutí a vydechnutí začne umělý nos efektivně fungovat.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| NÁVOD K POUŽITÍ | |  DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče |
| Název výrobku: | | |
| UMĚLÝ NOS TYP 301, 302 | | Katalogové číslo |
| Anesteziologie - A | Počet stran: 2/2 | Viz. níže |

Kontraindikace :

Nepoužívejte pro dehydratované pacienty nebo pro pacienty s příliš silnou sekrecí.
Nedávkujte jiný než doporučený přívodní objem, zvětšení mrtvého prostoru může způsobit zvýšenou koncentraci CO₂ při nižším přívodním objemu než 50 ml.

Upozornění :

- Používejte nejdéle 24 hodin nebo po kratší dobu, když to vyžaduje stav pacienta.
- Nahromadění většího množství sekretu způsobí sníženou prodyšnost a vyšší odpor při dýchání.
- Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití!
- V žádném případě nesterilizujte.
- Po použití zlikvidujte.

Balení:

50 ks/500 ks

Označení:

STERILE|EO

C E 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz