


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
<b>Název výrobku:</b>		
<b>BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČOVAČEM PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Anesteziologie - A</b>	<b>Počet stran: 1/2</b>	Viz. níže

**Popis výrobku:**

Pro umělou ventilaci pacientů, napojených na dýchací systém. Filtr se vřazuje mezi ET trubici a Y spojku, resp. In-ex hadici.

Katalogové číslo	sterilita
43.009.05.707	sterilní
43.009.05.708	nesterilní

**Doporučený přívodní objem:**

300 - 1500 ml

**Odpor:**

0,5 l/s = 130 Pa

1,0 l/s = 320 Pa

1,5 l/s = 550 Pa

**Hmotnost:**

29 g

**Filtrace:**

Polyuretanová pěna s impregnací CaCl<sub>2</sub>

**Mrtvý prostor:**

45 ml

**Účinnost bakteriální a virová filtrace:**

99,999%

**CO<sub>2</sub> konektor:**

ano

**Připojení:**


22/15 mm

**Návod k použití:**

Pro ochranu pacienta: zapojte filtr mezi ET trubici a Y spojku, resp. In-ex hadici.

Pro bakteriální ochranu: filtr může být vřazen přímo k ventilátoru. Před použitím zkontrolujte těsnost napojení konektorů, včetně luer uzávěru. Nastavte doporučený objem přívodního vzduchu.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČOVAČEM PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Anesteziologie - A</b>	<b>Počet stran: 2/2</b>	Viz. níže

#### Kontraindikace:

- Nepoužívejte pro dehydratované pacienty, pro pacienty s příliš silnou sekrecí a pro pacienty, u kterých hrozí riziko úniku ventilovaného vzduchu mimo filtr.
- Nedávkujte jiný než doporučený přívodní objem, zvětšení mrtvého prostoru může způsobit zvýšenou koncentraci CO<sub>2</sub> při nižším přívodním objemu než 300 ml.
- Nepoužívejte v kombinaci s přehřátou nebulizací nebo zvlčením, nepřidávejte uměle do okruhu vlhkost.

#### Upozornění:

- Používejte nejdéle 24 hodin nebo po kratší dobu, když to vyžaduje stav pacienta. Nahromadění většího množství sekretu způsobí sníženou prodyšnost a vyšší odpor při dýchání.
- V žádném případě nesterilizujte, funkčnost výrobku je po resterilizaci znehodnocena
- Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.
- Po použití zlikvidujte.

#### Balení:

50 ks

#### Označení:

 **€0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

#### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

#### Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)