


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČOVAČEM TYP HEPA PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	43.009.05.709

Popis výrobku:

Pro umělou ventilaci pacientů, napojených na dýchací systém. Filtr se vřazuje mezi ET trubici a Y spojku, resp.In-ex hadici.

Doporučený přívodní objem:

Vyšší než 200 ml

Odpor:

0,5 l/s = 67 Pa

1,0 l/s = 159 Pa

1.5 l/s = 287 Pa

Zvlhčení :

WT 500 ml = 30,2 mg/ H₂O

Hmotnost:

35 g

Mrtvý prostor:

74 ml

Účinnost bakteriální a virová filtrace:

99,999%

Filtrace :

Polyuretanová pěna s impregnací CaCl₂

CO₂ konektor:

Ano

Připojení:


22/15 mm

Návod k použití:

Pro ochranu pacienta: zapojte filtr mezi ET trubici a Y spojku, resp.In-ex hadici.

Pro bakteriální ochranu: filtr může být vřazen přímo k ventilátoru. Před použitím zkontrolujte těsnost napojení konektorů, včetně luer uzávěru. Nastavte doporučený objem přívodního vzduchu.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČOVAČEM TYP HEPA PRO UMĚLOU VENTILACI DOSPĚLÝCH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	43.009.05.709

Kontraindikace:

- Nepoužívejte pro dehydratované pacienty, pro pacienty s příliš silnou sekrecí a pro pacienty, u kterých hrozí riziko úniku ventilovaného vzduchu mimo filtr.
- Nedávkujte jiný než doporučený přívodní objem, zvětšení mrtvého prostoru může způsobit zvýšenou koncentraci CO₂ při nižším přívodním objemu než 200 ml, při vyšším objemu nemusí dojít k uspokojivému zvlčení vzduchu.
- Nepoužívejte v kombinaci s předeřhívaným zvlčením nebo nebulizací (odpojte filtr v případě této aplikace po dobu jejího trvání), rovněž nijak nezvyšujte vlhkost v okruhu, můžete tím zvýšit odpor filtru.

Upozornění:

- Používejte nejdéle 24 hodin nebo po kratší dobu, když to vyžaduje stav pacienta. Nahromadění většího množství sekretu způsobí sníženou prodyšnost a vyšší odpor při dýchání.
- V žádném případě nesterilizujte, funkčnost výrobku je po resterilizaci znehodnocena.
- Výrobek je určen výhradně pro jednorázové použití.
- Po použití zlikvidujte.

Balení:

50 ks

Označení:

 **€0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz