


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>TLAKOVÁ MANŽETA SAFEPRESS</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/1	Viz. níže

### Popis výrobku:

Plnohodnotný manometr. Balónek ze šroubovacím ventilem. Pevné poutko pro snadné zavěšení.

Katalogové číslo:	Objem
43.018.00.012	500 ml
43.019.00.012	1 000 ml

### Instrukce pro použití:

1. Pokud je žádoucí, označte manžetu jménem pacienta.
2. Zavěste přetlakovou manžetu na infúzní stojan.
3. Umístěte infúzní láhev nebo vak zavěšením na háček mezi přetlakový vak a síťku.
4. Uzavřete ventilek balónku otočením uzávěru po směru hodinových ručiček až na doraz.
5. Balónkem nafoukněte přetlakovou manžetu na požadovaný tlak.
6. Hadičku zajistěte klemou.
7. Před vyjmutím infúzní láhve nebo vaku uvolněte klemu a otočením uzávěru ventilku proti směru hodinových ručiček vyprázdněte přetlakovou manžetu.

### Upozornění:

vyvarujte se používání tlaku vyššího než 400 mmHg (červené pole manometru)

### Materiál:

Plastové provedení.

### Balení:

1 ks

### Označení:

**C € 0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

### P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

### Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

### Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)