


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODA</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Anesteziologie - A</b>	<b>Počet stran: 1/2</b>	49 – DP- 700

### Popis výrobku:

Fólie s elektrokonduktivním adhezivem (hydrogel) pro bezpečnou externí defibrilaci

### Návod k použití:

1. Odstraňte krycí podložku adheziva. Přesvědčte se, že gel podložky je dostatečně vlhký a lepidlo a ne suchý.
2. Přilepte elektrodu jedním koncem k pokožce a postupným rolováním nalepujte tak, aby pod elektrodou nezůstaly žádné vzduchové kapsy.
3. Lehkým stlačením zajistěte stálý kontakt s tělem po celé ploše podložky.
4. Přiložte rovnoběžně koncovky defibrilátoru a silně stlačte.
5. Po výkonu zlehka a opatrně sejměte defibrilační podložky z těla pacienta.


### Upozornění:

1. Defibrilační podložky slouží výhradně k jednorázovému použití
2. Neopouštějte na těle déle než 24 hodin
3. Při přemístování pacienta během výkonu dbejte na to, aby byl neustále zachován plný kontakt podložky s pokožkou.
4. Při opakované defibrilaci se přesvědčte, zdali není gel vysušený
5. Při opakované defibrilaci nastane pravděpodobně zarudnutí kůže
6. Nekvalitní kontakt podložky s pokožkou může způsobit poranění pacienta
7. Defibrilační podložky používejte výhradně pro účel defibrilace pacienta.

### Varování:

- Nenapojte defibrilační kabely k podložce
- Neupravujte tvar ani velikost podložky
- Nepřidávejte gel na lepidlovou stranu podložky
- Nepoužívejte podložku, pokud je gel suchý
- Nepoužívejte podložku, pokud je obal porušený nebo otevřený
- Nepřekládejte podložku, ani ji neskladujte pod těžkými předměty
- Skladujte v suchém a chladném prostředí, zamezte přístupu slunečního záření

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODA</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	49 – DP- 700

**Balení:**

10 párů

**Označení:**

STERILE|EO

CE  
0120

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**



**Unomedical**

11-17 Wilmette Place

(PO Box 405)

Mona Vale NSW 2103

Australia

[www.unomedical.com](http://www.unomedical.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**