


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SILIKONOVÉ MASKY		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

Katalogové číslo:	Velikost
51.500.00.000	0
51.500.00.001	1
51.500.00.002	3
51.500.00.003	3
51.500.00.004	4
51.500.00.005	5

Návod k použití:

1. Před použitím zkontrolujte, zda je čistý vzduchový kanál.
2. Pacient by měl být monitorován po celou dobu používání.
3. Masku buď přidržujte, nebo zajistěte pásem okolo hlavy.
4. Ujistěte se, zda jsou všechna spojení kompaktní a pevná.

Čištění a sterilizace:

1. Masku čistěte desinfekčními prostředky dle platné legislativy.
2. Po desinfikaci opláchněte vodou, vyvarujte se kontaktu pacienta s desinfikačními prostředky.
3. Sterilizovatelný ethylen oxidem (EO).
4. Autoklávovatelný při 134 °C.

Varování:

1. Skladujte v čistých a suchých podmínkách.
2. Neskladujte v teple a světle.

Balení:


1 ks

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SILIKONOVÉ MASKY		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	Viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!