
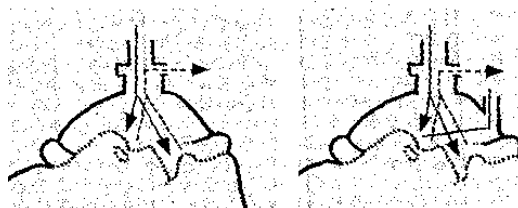


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OŽIVOVACÍ DÝCHACÍ OBLIČEJOVÁ MASKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/4	74.000.00.001

Použití:

Příruční oživovací maska byla vyvinuta především za účelem resuscitace dospělých, dětí a kojenců. Tento prostředek by měl být aplikován pouze osobami školenými v resuscitaci. Masku se vyrábí s přímou přípojkou pro dýchací vak nebo pro zařízení k inhalaci kyslíku.


Obsluha:




Pracovní postup pro různé aplikace je popsán níže.

Použití pro dospělé a děti:

1. Věnujte pozornost přesné pozici filtru a zmáčkněte masku tak, aby se vyklenula její vnější strana.

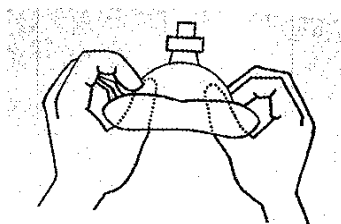

2.

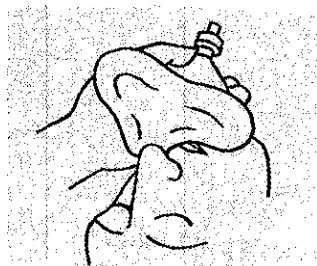


Poznámka:


Instrukce 2-4 aplikujte pouze pro dospělé a děti!

Umístěte masku částí pro bradu mezi spodní ret a bradu pacienta. Současně stiskněte spodní ret, tím udržíte ústa otevřená. Konec masky označený ▲ umístěte pod nos pacienta.

3. Utěsněte masku podle ilustrace. Otevřete dýchací kanály. Vydechujte opatrně do masky, dokud se hrudník zvedá

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OŽIVOVACÍ DÝCHACÍ OBLIČEJOVÁ MASKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/4	74.000.00.001

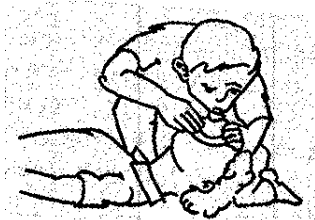

4. Uvolněte masku ze svých úst a nechte pacienta vydechnout.


Poznámka:

V případě, že pacient zvrací, odstraňte masku a uvolněte respirační kanály. Vyčistěte masku. Foukněte do ventilu, abyste se ujistili o správné funkci. Umístěte masku zpět a pokračujte v respiraci.

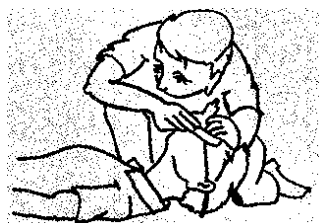



Použití pro kojence:

Sledujte výše uvedené instrukce s výjimkou umístění masky. V tomto případě se maska umísťuje na obličej opačnou stranou, zúženým koncem pod bradu kojence.

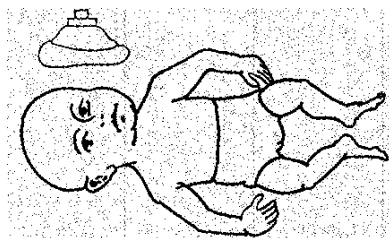


Použití s kyslíkem:

Masku fixujte pomocí gumičky. Přídavný kyslík může být dodáván pomocí kyslíkového portu na masce. Pokud je třeba, je možné přívod kyslíku zastavit . V případě nutnosti je možné i nadále dýchat.

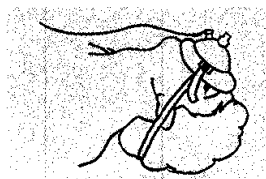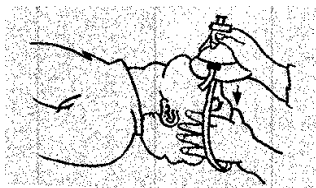

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OŽIVOVACÍ DÝCHACÍ OBLIČEJOVÁ MASKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 3/4	74.000.00.001

Filtr:

Složte masku.

Vyjmutí filtru:

1. Vezměte masku jednou rukou, sevřete tělo filtru palcem a dvěma prsty druhé ruky.
2. Vyjměte filtr.

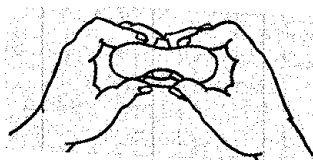**Vložení nového filtru:**

Tlačte nový filtr nahoru, podle obrázku, dokud filtr nezapadne.

Poznámka:

Maska může být použita i bez filtru.

Čištění:

Maska je určena k opakovanému použití. Je snadno čistitelná. Doporučuje se vyměnit po každém použití. Masku myjte teplou mýdlovou vodou a poté ji na 10 minut ponořte do desinfekčního roztoku. (Doporučuje se např. zředěný prostředek na bělení /1:64/, který se běžně používá v domácnosti.) Masku znovu opláchněte a nechte uschnout. Nesterilizujte masku varem, plynem ani parou.

Pokud je maska lepivá, vyčistěte ji podle výše uvedeného popisu.

Vlastnosti:**Teplotní podmínky:**

Pracovní teplota: -18 °C - -40 °C

Skladovací teplota: -30 °C - -50 °C

Expirační odpor pro pacienta:


Maska s jednocestným ventilem

1,5 cm H₂O sloupce při průtoku 50 l/min.

Maska, filtr a jednocestný ventil

2,5 cm H₂O sloupce při průtoku 50 l/min.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
OŽIVOVACÍ DÝCHACÍ OBLIČEJOVÁ MASKA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 4/4	74.000.00.001

Expirační odpor pro pacienta:

Maska s jednocestným ventilem

2 cm H₂O sloupce při průtoku 50 l/min.

Maska, filtr a jednocestný ventil

2,5 cm H₂O sloupce při průtoku 50 l/min.

Mrtvý prostor:

méně než 80 ml

Velikost ventilu masky:

15 mm

Velikost kyslíkového ventilu:

6,4 mm

Balení:

1 ks

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz