


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TLAKOVÁ MANŽETA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	90.000.02.700

Popis výrobku:

Pro přetlakovou transfúzi, infúzi nebo angiografii. Eliminuje nebezpečí vzduchové embolie. Rovnoměrným tlakem na krevní vak snižuje riziko poškození a znehodnocení červených krvinek. Zaručuje sterilitu aplikované látky a kontinuální převod krevního derivátu či infúze.

Manuální použití

1. Pokud je třeba, proveďte záznam v pacientově dokumentaci.
2. Pověste tlakovou manžetu na infúzní stojan.
3. Vložte sáček s infúzním roztokem mezi manžetu a rukáv manžety.
4. Zavěste sáček na plastový háček.
5. Otočením uzavřete vzduchový ventil u balónku.
6. Pomocí balónku nafoukněte manžetu na požadovaný tlak.
7. Pro vyfouknutí manžety uvolněte vzduchový ventil.

Použití s pumpou

1. Pokud je třeba, proveďte záznam v pacientově dokumentaci.
2. Pověste tlakovou manžetu na infúzní stojan.
3. Odmontujte balónek.
4. Připojte manžetu na vzduchový ventil pumpy.
5. Sledujte ukazatel tlaku na pumpě.
6. Znovu k manžetě připojte balónek.


Upozornění:

Ujistěte se, že je ručička na manometru plně funkční.. Pravidelně kontrolujte tlak. Dahlhausen CZ nezodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím vzniklým neoprávněnou osobou. Tlaková manžeta je určena pro jednorázové použití. Nešetrné zacházení může negativně ovlivnit přesnost manometru. Před použitím si ověřte přesnost manometru. Nenahušťujte na více než 400 mmHg!!!

Balení:

1 ks

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TLAKOVÁ MANŽETA		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	90.000.02.700

Označení:

STERILE | EO

 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN**
...

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!