


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NABÍJEČKA PRO AKUMULÁTOR		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/2	90.003.11.900

Popis výrobku:

Nabíječka slouží k opakovanému nabití akumulátorů laryngoskopické rukojeti daného typu.

Návod k použití:

Nabíječka slouží k opakovanému nabití akumulátorů laryngoskopické rukojeti daného typu a není posuzována jako prostředek zdravotnické techniky. Akumulátor se vkládá do nabíječky buď samotný, nebo zašroubovaný v plášti rukojeti. Porušení zapečetěného uzavření nabíječky je možno pouze výrobcem. V opačném případě výrobce neposkytuje záruční podmínky.

Po zapojení nabíječky do zdroje zelené světlo na čelním panelu nabíječky indikuje připravenost k použití. Vložte akumulátor do otvoru nabíječky. Pro akumulátor, resp. dětskou rukojeť, použijte redukci, vloženou v otvoru nabíječky. Opačně, pro rukojeť pro dospělé redukci vyjměte. Červené světlo zůstává svítit během vlastního nabíjení. Po zhruba 6-ti hodinách je nabíjení ukončeno a červené světlo zhasne. Akumulátor je možno ponechat v nabíječce, ve které bude nabíjení periodicky pokračovat po samovolné ztrátě napětí v akumulátoru, ten pak bude vždy připraven k použití s maximální kapacitou.

Bezpečnostní informace:

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátorová rukojeť a nabíječka nejsou konstruovány pro použití v místech s možnou explozí.
- Nabíječku je možno použít pouze pro typ akumulátoru se shodnou charakteristikou, uvedenou na spodní straně nabíječky. Použití jiných typů akumulátoru může vést k jejich poškození.
- Nikdy neponechávejte v bezprostřední blízkosti nabíječky média s uloženými magnetickými daty – diskety, magnetické pásky, platební karty atd. Data mohou být poškozena.

Technická data:


Zdroj proudu: 230V, 50/60 Hz

Spotřeba: 10 VA

Typ nabíjení: indukční

Frekvence: 65 kHz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NABÍJEČKA PRO AKUMULÁTOR		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/2	90.003.11.900

Rozměry: 150 x 80 x 58 mm

Průměr otvoru bez redukce: 32 mm

S redukcí: 22 mm

Čištění:

Před čištěním vždy odpojte nabíječku od zdroje proudu! Použijte měkký hadřík, navlhčený mýdlovou vodou. Před použitím otřete do sucha.

Provozní a skladovací podmínky:

Skladování: teplota od -20 °C do +60 °C, relativní vlhkost od 10 % do 90 %.

Provoz: teplota od +10 °C do +40 °C, relativní vlhkost od 30 % do 70 %.

Likvidace:

Při likvidaci nabíječky postupujte v souladu se zákonem o likvidaci elektronického odpadu, nefunkční akumulátory předejte do specializovaných sběrů nebo vraťte dodavateli.

Balení:

1 ks

Označení:

C E 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz