


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KOMPLETNÍ LARYNGOSKOPICKÝ SET MCINTOSH, NEWMCINTOSH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 1/3	Viz. níže

Popis výrobku:

Transportní kufřík s držadlem, 3 různé velikosti lžic McIntosh (dle vlastního výběru)

Laryngoskop se studeným světlem obsahuje součásti s optickým vláknem, o které je třeba náležitě dbát a pečovat, aby laryngoskop vždy fungoval přesně a spolehlivě. Dodržujte proto zásady při čištění a údržbě podle tohoto návodu.

Katalogové číslo:	popis	Určeno pro
90.003.10.000	s bateriemi	dospělé
90.003.10.010, 90.005.00.001	s akumulátorem	dospělé
90.003.10.001	s bateriemi	děti
90.003.10.011	s akumulátorem	děti


Čištění nástroje po použití, před-desinfekce

- Odejměte veškeré elektrické součásti z rukojeti laryngoskopu. Nikdy nečistěte pouzdro pro baterie, baterie nebo další části pouzdra vodou nebo vodními roztoky! Výhradně používejte čistících prostředků na bázi alkoholu!
- Nástroj ihned po použití ponořte do desinfekčního roztoku, který neobsahuje prvky rtuti, zabráníte tím možnému rozšíření infekce z kontaminované laryngoskopické lžice. Včasné ponoření do roztoku rovněž zabrání zaschnutí zbytků krve a sekretů na povrchu lžice a usnadní se tak její očištění. Věnujte rovněž pozornost přípravě a ředění desinfekčních roztoků dle návodu výrobců. Jako kompatibilní roztoky doporučujeme použít např. Bacillotox, Baktol, Cidex, Gigasept, Ivisol, Korsalin, Orbiphen. Po desinfekci důkladně opláchněte destilovanou vodou.

Čištění a desinfekce

- ručně** : ihned po a před-desinfekcí očištěte nástroj měkkým kartáčkem v mýdlové vodě, potom opláchněte destilovanou vodou a vysušte nástroj měkkým hadříkem
- automaticky**: dbejte pokynů výrobce vašeho automatického zařízení, zejména co do koncentrace použitých desinfekčních prostředků a délky cyklu. Teplota by neměla překročit 65 °C.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku: KOMPLETNÍ LARYNGOSKOPICKÝ SET MCINTOSH, NEWMCINTOSH		
		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 2/3	Viz. níže

Upozornění

K čištění nikdy nepoužívejte ultrazvuk.

Sterilizace

Laryngoskop se studeným světlem může být sterilizován v autoklávu do 134 °C, ačkoliv v tomto případě dochází ke zkracování životnosti nástroje, je vhodné autoklávat kovové části laryngoskopu, zatímco světelné vlákno (v případě, že máte typ s odnímatelnou optikou) sterilizovat jiným způsobem.

Upozornění

V žádném případě nepoužívejte flash autokláv nebo horkovzdušnou sterilizaci.

Příprava k použití

Sestavte dohromady všechny elektrické části rukojeti a zmáčknutím na černý trychtýřek obepínajícím žárovku se přesvědčte, zda-li se žárovka rozsvítí. Pokud ne, zkontrolujte znovu, zda byla rukojeť správně sestavena, případně, má -li akumulátor nebo baterie dostatečnou kapacitu.

Poznámka


Náhradní součásti objednávejte u distributora. Používání jiných částí může způsobit nefunkčnost nástroje, která v tomto případě nemůže být řešena v záruční lhůtě, pokud trvá.

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
KOMPLETNÍ LARYNGOSKOPICKÝ SET MCINTOSH, NEWMCINTOSH		Katalogové číslo
Anesteziologie - A	Počet stran: 3/3	Viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!