


|                                  |                         |   |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| <b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>           |                         |  <b>DAHLHAUSEN CZ</b><br>... intenzivní péče |
| <b>Název výrobku:</b>            |                         |   |
| <b>ODSÁVACÍ MINISETY - 50 ML</b> |                         | <b>Katalogové číslo</b>   |
| <b>Chirurgie - CH</b>            | <b>Počet stran: 1/1</b> | 05.000.22.554   |

### Návod k použití:

1. Aplikujte drén
2. Stlačte na maximum odsávací nádobku
3. Nasad'te konec drénu do šroubovacího konektoru
4. Dotáhněte šroubovací konektor

Sterilní, nepyrogení

Použijte pouze v případě nepoškozeného obalu.

Revize č. 1 :22.9.2011

### Výrobce:

**Primed Halberstadt**  
Medizintechnik GmbH  
Strasse des 20. Juli 1  
D-38820 Halberstadt  
Germany  
[www.primed-halberstadt.de](http://www.primed-halberstadt.de)

### Distributor:

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**  
Knínická 1577  
664 34 Kuřim  
Česká republika  
[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ** , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**