


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
MAGNETICKÁ PODLOŽKA NA BĚŽNÉ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	09.700.00.000

Popis výrobku:

Opakovaně použitelná magnetická podložka je určena pro uložení běžných chirurgických nástrojů. Její protismykové magnetické body zabezpečují pevné uchycení nástrojů. Čímž se minimalizuje riziko poranění při manipulaci s nimi. Její speciální síťový povrch ze silikonu a nylonu umožňuje spolehlivě uložení nástrojů v prostoru operačního pole. Magnetickou podložku je možné sterilizovat v autoklávu.

Použití

Opakovaně použitelná magnetická podložka je určena pro uložení běžných chirurgických nástrojů pomocí zabudovaných magnetů na sterilní ploše a umožňuje bezpečnou manipulaci s nimi během operace.

Návod na po užití:


1. Během přípravy vložte podložku do autoklávu nebo jiného zařízení ke sterilizaci parou.
2. Sterilní podložku umístěte na vhodné místo v blízkosti operačního zákroku a použijte podle účelu.
3. Po ukončení operace podložku opláchněte teplou vodou, jemně ji vykartáčujte a důkladně očistěte.
4. Čistou podložku až do dalšího použití vhodně uskladněte.
5. Poškozenou podložku zlikvidujte podle interních předpisů.

Bezpečnostní opatření:

1. Magnetická podložka je pomůcka, kterou je možné používat opakovaně.
2. Dodává se jako nesterilní. Doporučuje se, aby se před použitím sterilizovala parou.
3. Podložku pečlivě zkontrolujte a nepoužívejte, pokud jste na jejím povrchu objevili nějaké známky poškození.
4. Zabraňte přímému kontaktu s elektronickými nástroji.
5. Zamezte poškození podložky ostrými předměty.
6. Nepokládejte podložku na hrudník pacienta, jestliže má kardiostimulátor nebo defibrilátor.
7. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
MAGNETICKÁ PODLOŽKA NA BĚŽNÉ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	09.700.00.000

8. Poškozenou podložku likvidujte podle interních předpisů pro manipulaci s kontaminovaným materiálem.

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!