


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SURGI PEN		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. níže

### Popis výrobku:

Kauter se používá k odstranění a rozrušení tkáně a ke koagulaci. Kauter pracuje na základě vysokofrekvenčního proudu.

katalogové číslo:	typ
18.000.02.666	třípinový
18.000.02.665	jednopinový 5 mm
18.000.02.664	jednopinový 4 mm

### Návod k použití:

Před tím, než zapojíte kauter do sítě dbejte toho, aby měl pacient správně umístěnou a dokonale ke kůži přilnutou elektrokonduktivní uzemňovací elektrodu. Před použitím dbejte na správné zapojení všech částí a ověřte správné propojení koncové pracovní elektrody s kauterem a jejich vzájemnou slučitelnost. V opačném případě by mohlo dojít k poranění pacienta resp. personálu na operačním sále. Vyzkoušejte a zajistěte správné propojení kauteru s generátorem.

Otevřete sterilní obal kauteru a umístěte ho na sterilní místo.

Presvědčte se, zda je koncová pracovní elektroda řádně nasazená na kauter.

Pro správné použití dodržujte postupy, uvedené v příručce pro generátor.

### Rizika :

Příslušenství kauteru, které je aktivní anebo po použití ještě horké, může způsobit požár. Neodkládejte je v blízkosti hořlavých kapalin nebo materiálu.

Pokud kauter nepoužíváte, uložte ho do pouzdra na čisté, suché, nevodivé a dobře viditelné místo, ne v blízkosti pacienta. Neúmyslný kontakt s pacientem může mít za následek jeho popálení.


### Důležité :

Smyčkové a jehlové koncové elektrody nejsou vhodné na použití v režimu koagulace.

Neuvádějte generátor do režimu koagulace, pokud jsou ke kauteru nasazeny smyčkové nebo jehlové koncové elektrody.

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 <b>DAHLHAUSEN CZ</b> ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>SURGI PEN</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Chirurgie - CH</b>	<b>Počet stran: 2/2</b>	Viz. níže

### Upozornění:

Kauter je sterilně balený a slouží výhradně k jednorázovému použití bez možnosti opakované sterilizace. Dodržujte všechny instrukce uvedené v příručce pro vysokofrekvenční generátor a jeho nastavení. Před chirurgickým zákrokem sa přesvědčte, zda je generátor správně nastavený. Snažte se pracovat s co nejnižším výkonem pro dosažení požadovaného zákroku. Nepoužívejte v případě poškozeného nebo otevřeného obalu!

### Balení:

1 ks

### Označení:

STERILE | EO

**CE 0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

### Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

### Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**