


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NEUTRÁLNÍ ELEKTRODA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	76.333.00.001

Popis výrobku:

Neutrální elektroda, různé varianty viz. tabulka.

katalogové číslo:	typ
19.000.02.401	jednodílná
19.000.02.402	dvoudílná
19.000.02.602	dvoudílná, čtvercová
10.000.02.403	jednodílní dětská
10.000.02.404	dvoudílní dětská

Návod k použití:

Vyberte sval popř. dobře prokrvené klenuté místo na povrchu těla v blízkosti operačního pole, ne však blíže než 20 cm. U dospělých dávejte přednost horní části paže nebo stehnu, u dětí trupu. Nelepte na ochlupená místa, nebo místa, kde se vyskytují jizvy, kosti se nacházejí v blízkosti povrchu těla, kůže je zarudlá nebo jakkoli poškozená. Vybrané místo musí být k operačnímu poli blíže než nejbližší EKG elektroda.


- vybrané místo oholte, očistěte a osušte
- nalepte elektrodu směrem od jednoho jejího rohu k protilehlému okraji, vyvíjejte rovnoměrný tlak
- ujistěte se, že elektroda pevně přilnula po celém svém povrchu a že konektor je bezpečně připevněn k elektrodě
- po použití odstraňte elektrodu nadzdvihnutím jednoho jejího rohu (ne za místo připevnění konektoru) a jemně ji odlepujte

Pozor:

- nepoužívejte žádný další gel, neupravujte velikost elektrody
- nepřekládejte, nepřelepujte
- pokud měníte polohu pacienta, znovu se přesvědčte, že elektroda přilíná k tělu pacienta celým povrchem
- pokud během operace dochází ke snížení účinnosti řezání nebo koagulace, přesvědčte se, zda je elektroda v plném kontaktu s pokožkou pacienta. Teprve poté zvyšte výkon přístroje

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NEUTRÁLNÍ ELEKTRODA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	76.333.00.001

- nepoužívejte dětské elektrody na pacienty o hmotnosti nižší než 11,5 kg
- nepoužívejte dětské elektrody pro zákroky, k nimž je třeba velkého výkonu (např. transureterální resekce)
- řiďte se podle návodu k použití diatermických pomůcek
- nepoužívejte opakovaně

Varování:

Nesprávné použití může vést k popálení pokožky pacienta.

Balení:

50/200 ks

Označení:

C € 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!