


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNAMESH PP LIGHT, STANDARD		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:1/4	viz. níže

## 1. CHARAKTERISTIKA

**DynaMesh – PP** je síťkový implantát (mesh) k zesílení vazivových struktur. **DynaMesh – PP** nemá vlastní farmakologické účinky a není toxický.

**DynaMesh – PP** je utkán z neresorbovatelného, biostabilního polypropylenového monofilamentu (vlákna). Speciálně vyvinutá tkaná struktura a ideální velikost ok **DynaMesh – PP** jsou optimálně sladěny s dynamometrickou břišní stěny.

**DynaMesh – PP** se dodává ve čtyřech různých velikostech (6 cm x 11 cm, 10 cm x 15 cm, 15 cm x 15 cm, 30 cm x 30 cm) a ve dvou hmotnostních provedeních:

**DynaMesh Light** se zhruba  $36 \text{ g/m}^2$

katalogové číslo:	kód VZP	rozměry (cm)
26.100.10.611	99980	6 x 11
26.100.11.015	99981	10 x 15
26.100.11.515	99982	15 x 15
26.100.13.030	99983	30 x 30

**DynaMesh Standard** se zhruba  $72 \text{ g/m}^2$

katalogové číslo:	kód VZP	rozměry (cm)
26.100.20.611	99984	6 x 11
26.100.21.015	99985	10 x 15
26.100.21.515	99986	15 x 15
26.100.23.030	99987	30 x 30

## 2. INDIKACE


**DynaMesh – PP** slouží k podpoře tkání a ke stabilizaci fasciálních struktur břišní stěny.

Obvyklými aplikacemi jsou reparace tříselných hernií a hernií vzniklých v jizvě při běžných operačních metodách jako např. technikou podle Lichtensteina nebo TIPP, stejně jako laparoskopickou technikou transabdominální preperitoneální herniální plastiky (TAPP) a totální extraperitoneální herniální plastiky (TEP).

**DynaMesh – PP** se vybírá z výrobního programu dle velikosti defektu a může být ve vztahu k defektu přistřížen mimo operační pole.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNAMESH PP LIGHT, STANDARD		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:2/4	viz. níže

Přitom je nutno síťku vytvarovat tak, že přečnává defekt na všech stranách zhruba o 5 cm. Síťka může být přistřižena dle individuálních požadavků pomocí ostrých nůžek nebo skalpelem.

### Fixace

Při fixaci by se měl uchopit nejméně 1 cm okraje síťky; přitom by měl být dodržen odstup 1 – 2 cm mezi jednotlivými stehy. Tloušťka šicího materiálu by se měla řídit chirurgovými preferencemi a druhem rekonstrukce.

Alternativně mohou být použity také clipsy (spínátka), staplery (sponky) nebo svorky. Velikost svorek a odstupů mezi nimi volí chirurg podle svých zkušeností.

### 3. KONTRAINDIKACE

Veškeré obvyklé kontraindikace pro nasazení implantátu na podporu tkání platí také pro použití **DynaMesh – PP**.

K nim mimo jiné patří:

- Síťka by se neměla používat kvůli zvýšenému riziku infekce při předchozím otevření střeva.
- Síťka musí být vždy od dutiny břišní oddělena peritoneem.
- Síťka není vhodná k použití ve smyslu plusu (ucpávky).

Opatrnost je nutná u rostoucích dětí, u pacientů s manifestními infekcemi a u těhotných.

### 4. VAROVÁNÍ


Operatér musí být obeznámen s používanými technikami herniální plastiky, než nasadí **DynaMesh – PP**.

Při použití **DynaMesh – PP** v kontaminované ráně je možná následná infekce, která si může vyžádat odstranění materiálu.

Až do implantace je nutno dbát na přísně sterilní manipulaci. Aplikace smí být prováděna pouze v aseptických prostorách.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNAMESH PP LIGHT, STANDARD		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:3/4	viz. níže

Poškozené implantáty se nesmějí používat; zejména je nutno zabránit kontaktu s ostrými předměty.

**DynaMesh – PP** nesmí být implantován

- je-li překročena minimální doba použitelnosti nebo
- je-li obal poškozen nebo
- postávají-li pochyby o jeho neporušenosti.

Implantát je zabalen ve sterilním dvojitém obalu. Vnitřní obal se má otvírat teprve při nasazení sítě. Doporučuje se manipulovat se sítí pouze sterilními a čistými nástroji.

Z obecně se vyskytujících možných komplikací u meshes (sítěk) je nutno jmenovat: seromy, hematomy, recidivy, infekce a viscerální srůsty.

Chirurg je zodpovědný za komplikace, které vzniknou chybnou indikací, nedostatečnou operační technikou nebo aseptickou chybou. Ve všech případech se doporučuje doprovázet zásah odpovídajícími opatřeními následné péče.

## 5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V literatuře se nenacházejí žádné odkazy na nežádoucí účinky použitého polypropylenu. Jako všechna cizí tělesa může **DynaMesh – PP** negativně ovlivnit preexistující infekci a vést k přechodnému lokálnímu dráždění. Existuje možnost adhezí, když se implantát nachází v přímém kontaktu se střevem.

## 6. STERILITA

Výrobek je sterilizován ethylenoxidem.

Je nepřípustné **DynaMesh – PP** resterilizovat!

Výrobek se nesmí používat, je-li obal poškozen nebo otevřen!


Bezpodmínečně zamítněte otevřené, nepoužité výrobky!

## 7. UCHOVÁVÁNÍ

Doporučené skladovací podmínky jsou:

- v suchu při pokojové teplotě,

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>DYNAMESH PP LIGHT, STANDARD</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Gynekologie - G</b>	<b>Počet stran:4/4</b>	viz. níže

- chráněno před vlhkostí a přímým vlivem tepla,
- chránit před UV zářením,
- skladovat pouze v originálním obalu,
- nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti!

**Označení:**

STERILE|EO

CE 0481

**Datum revize textu: 01. 06. 2011**

**Výrobce:**



**FEG Textiltechnik**

Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Juelicher Strasse 338a

D-52070Aachen/Germany

[www.dyna-mesh.com](http://www.dyna-mesh.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**