


| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| NÁVOD K POUŽITÍ | |  DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče |
| Název výrobku: | | |
| SILIKONOVÁ HADICE | | Katalogové číslo |
| Anesteziologie - A | Počet stran: 1/1 | Viz. níže |

Popis výrobku:

Silikonová hadice je vyrobena z nedráždivého silikonu. 1 role = 25 m

| Katalogové číslo: | Vnitřní pr. x vnější pr. /mm |
|-------------------|------------------------------|
| 34.000.00.100 | 1 x 3 |
| 34.000.00.101 | 1,5 x 3 |
| 34.000.00.102 | 2 x 4 |
| 34.000.00.103 | 3 x 5 |
| 34.000.00.104 | 4 x 6 |
| 34.000.00.105 | 4 x 7 |
| 34.000.00.106 | 5 x 7 |
| 34.000.00.107 | 5 x 8 |
| 34.000.00.108 | 5 x 9 |
| 34.000.00.109 | 6 x 9 |
| 34.000.00.110 | 6 x 12 |
| 34.000.00.111 | 7 x 10 |
| 34.000.00.112 | 8 x 12 |
| 34.000.00.113 | 10 x 14 |

Návod k použití:

1. Před prvním použitím silikonovou hadici vyčistěte dle následujících pokynů.
 - a. Důkladně se omyje čisticím roztokem neobsahující olej.
 - b. Poté se hadice důkladně vypláchne destilovanou vodou.
2. Následně se hadice vyčistí 70% IPA roztokem.
3. Silikonová hadice se vysterilizuje při teplotě 134 °C.

Balení:

1 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

Označení:

 **0123**

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz