


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SILIKONOVÁ HADICE METRÁŽ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. Níže

Silikonová hadice je vyrobena z neдрáždivého silikonu. 1 role = 25 m

Katalogové číslo:	Vnitřní pr. x vnější pr. /mm
34.000.00.100	1 x 3
34.000.00.101	1,5 x 3
34.000.00.102	2 x 4
34.000.00.103	3 x 5
34.000.00.104	4 x 6
34.000.00.105	4 x 7
34.000.00.106	5 x 7
34.000.00.107	5 x 8
34.000.00.108	5 x 9
34.000.00.109	6 x 9
34.000.00.110	6 x 12
34.000.00.111	7 x 10
34.000.00.112	8 x 12
34.000.00.113	10 x 14

Návod k použití:

- Před prvním použitím silikonovou hadici vyčistěte dle následujících pokynů.
 - Důkladně se omyje čisticím roztokem neobsahující olej.
 - Poté se hadice důkladně vypláchne destilovanou vodou.
- Následně se hadice vyčistí 70% IPA roztokem.
- Silikonová hadice se vsterilizuje při teplotě 134 °C.

Balení:

1 ks


Označení:

C **€** 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SILIKONOVÁ HADICE METRÁŽ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	Viz. Níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!