


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SURGIPEN LINA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	508/512

Návod k použití:

Pro dosažení maximální trvanlivosti čtete prosím pozorně návod k použití:

1. Ujistěte se, že je elektroda zcela zasunuta v kauteru.
2. Nikdy neodkládejte kauter na pacienta.
3. pokud během operace kauter právě nepoužíváte, umístěte jej do speciálního držáku
4. Vyjměte elektrodu z kauteru. Omyjte ji v laboratorní myčce, opláchněte vlažnou vodou a otřete. Ponořte elektrodu do roztoku nebo ultrazvukové lázně.

Důležité upozornění: Před sterilizací nechte kauter zcela oschnout.

B. 1. AUTOKLÁV

Parní sterilizace (autokláv) – jednotlivě balené

134⁰ C – 3 – 5 minut/18 minut

121⁰ C – 10 – 20minut

Použijte sušící program

Nebalené:

Zamezte styku s ostatními nástroji. Zabráníte tak poškození kauteru, zakončení, kabelu i zástrčky

Důležité upozornění nechte kauter řádně oschnout.

B. 2. ETYLÉNOXID (FORMALDEHYD)

Sterilizace etylénoxidem (formaldehydem)

Kontrola kauteru po omytí a sterilizaci


Prosím postupujte podle následujících instrukcí

1. vizuální kontrola: kabel a zástrčka musejí být nepoškozené
2. kontrola pomocí elektrického proudu: použijte Lina Penci Tester nebo jiný elektrochirurgický generátor. Nastavte minimální výkon. Zkontrolujte a ověřte, zda funkce řezání a koagulace pracují správně

Pokud se kauter jeví ve výše uvedených kontrolách jako vadný, nepoužívejte jej.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SURGIPEN LINA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	508/512

Označení:



Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Lina Medical CML ApS

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!