


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/3	Viz. Níže

Účel použití: katétr pro trombektomii je určen pro intraoperativní odstranění krevních sraženin z žil.

Popis: katétr se skládá z vlastního jednoduchého lumen ze silikonu, ocelového drátu, který vyztužuje silikonový lumen a činí ho tužším a silikonového balónku na distálním konci. Napojení na injekční stříkačku je umožněno polykarbonátovou spojkou luer - uzávěr. Součástí setu je injekční stříkačka odpovídajícího objemu. Délkové značení na lumen katétru je značeno po 10 cm.


Princip operace: postižená céva se chirurgicky zpřístupní proximálně nad místem s výskytem trombu. Vybere se odpovídající velikost katétru vzhledem k velikosti žíly. katétr se vloží do žíly a distálně se zasune přes překážku, trombus, s nenaplněným balónkem. Když je balónek za překážkou, naplní se např. sterilním fyziologickým roztokem a vytahuje se směrem k žilní incizi. Balónek před sebou tlačí uvolněný trombus, který se vyjme incizí vytvořeným otvorem.

Specifikace: všechny velikosti katétrů jsou dodávány v délce 80 cm.

katalogové číslo	ø/F	Délka (cm)	ø balónku (mm)	Max. objem balónku (ml)	barva	Kód VZP
55.000.02.040	2	40	4	0,05	Fialová	92 322
55.000.02.060	2	60	4	0,05	Fialová	92 323
55.000.03.040	3	40	5	0,10	Zelená	92 324
55.000.03.080	3	80	5	0,10	Zelená	92 325
55.000.04.040	4	40	9	0,50	Červená	92 326
55.000.04.080	4	80	9	0,50	Červená	92 327
55.000.04.100	4	100	9	0,50	Červená	92 328
55.000.05.040	5	40	11	0,75	Bílá	92 329
55.000.05.080	5	80	11	0,75	Bílá	92 330
55.000.06.040	6	40	13	1,25	Modrá	92 331
55.000.06.080	6	80	13	1,25	Modrá	92 332
55.000.07.080	7	80	14	2,00	Žlutá	92 333

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 <small>... intenzivní péče</small>
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/3	Viz. Níže

Testování: pohledem zkontrolujte, zdali u katétru s naplněným balónkem po předchozím přesném nastavení stříkačky nedochází k úniku tekutiny buď z balónku nebo jiné části katétru.

Upozornění: nenaplňujte balónek větším než maximálně doporučeným objemem tekutiny (MLV).

Naplnění tekutinou: naplňte stříkačku doporučené velikosti maximálním objemem dle hodnoty MLV, sterilním, s krví kompatibilním roztokem (např. fyziologickým roztokem). Odstraňte prostříknutím vzduch ze stříkačky a připojte stříkačku spojkou luer-uzávěr ke katétru. Pístem stříkačky natáhněte vzduch z balónku a katétru. Naplňte balónek malým objemem kapaliny a znovu vyprázdněte. Jemným poklepem odstraňte z katétru vzduch. Opakujte tento postup, dokud neodstraníte z katétru všechn vzduch. Před úplným naplněním balónku postupujte dle doporučených instrukcí pro vyzkoušení balónku.

Vyzkoušení balónku: pro optimální účinnost by měl být balónek vyzkoušen v následujícím pořadí úkonů po naplnění katétru kapalinou. Odpojte stříkačku od katétru a znovu nastavte objem kapaliny ve stříkačce podle maximálního objemu MLV. Připojte stříkačku koncovkou Luer. Naplňte a vyprázdněte balónek postupně ve třech krocích s vyšším objemem kapaliny při každém kroku (to zn. 50%, 75% a 100% doporučeného maximálního objemu kapaliny MLV). Při této zkoušce výše popsaným postupem aspirujte vzduchové bubliny.


Záruka: LMI ručí za odpovídající péči o své produkty během výroby. Záruka na výrobek se poskytuje v souladu s českým právním řádem. Nevztahuje se na škody vzniklé nesprávným zacházením a použitím.

Upozornění: stejně jako u veškeré katetrizace mohou nastat i zde komplikace. Medicínské stanovisko lékaře je jeho vlastní odpovědností.

1. Použití vysoce viskózních nebo koncentrovaných roztoků není doporučeno vzhledem k možnosti ucpání katétru.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 3/3	Viz. Níže

2. Balení je sterilní pouze při neporušeném a neotevřeném obalu. Znovu nesterilizujte. Katétr je určen výhradně pro jednorázové užití.
3. Překročení největšího doporučeného objemu kapaliny velmi zvyšuje nebezpečí prasknutí balónku a poškození arterie.
4. Katétr není vyroben ani doporučen pro endarterektomii, dilatační nebo okluzní výkony.
5. Je třeba brát na vědomí možnost prasknutí balónku, zvláště pokud je použit vzduch, jako plnicí médium.
6. Vzduch by neměl být použit pro naplnění balónku, pokud by v případě prasknutí způsobil vzduchovou embólii.
7. Lékař musí správně posoudit objem naplnění balónku a tažnou sílu, aby zabránil poškození cévy, poškození její vnitřní stěny nebo disekci.

Plnicí tekutina: katétr by měl být před použitím prostříknut sterilní, s krví souhlasnou tekutinou (např. izotonický fyziologický roztok). Plyn nebo vzduch se nedoporučují.

Označení:

STERILE EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!