


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/3	Viz. Níže

Účel použití: katétr pro trombektomii je určen pro intraoperativní odstranění krevních sraženin z žil.

Popis: katétr se skládá z vlastního jednoduchého lumen ze silikonu, ocelového drátu, který vyztužuje silikonový lumen a činí ho tužším a silikonového balónku na distálním konci. Napojení na injekční stříkačku je umožněno polykarbonátovou spojkou luer - uzávěr. Součástí setu je injekční stříkačka odpovídajícího objemu. Délkové značení na lumen katétru je značeno po 10 cm.


Princip operace: postižená céva se chirurgicky zpřístupní proximálně nad místem s výskytem trombu. Vybere se odpovídající velikost katétru vzhledem k velikosti žíly. katétr se vloží do žíly a distálně se zasune přes překážku, trombus, s nenaplněným balónkem. Když je balónek za překážkou, naplní se např. sterilním fyziologickým roztokem a vytahuje se směrem k žilní incizi. Balónek před sebou tlačí uvolněný trombus, který se vyjme incizí vytvořeným otvorem.

Specifikace: všechny velikosti katétrů jsou dodávány v délce 80 cm.

katalogové číslo	ø/F	Délka (cm)	ø balónku (mm)	Max. objem balónku (ml)	barva	Kód VZP
55.000.02.040	2	40	4	0,05	Fialová	92 322
55.000.02.060	2	60	4	0,05	Fialová	92 323
55.000.03.040	3	40	5	0,10	Zelená	92 324
55.000.03.080	3	80	5	0,10	Zelená	92 325
55.000.04.040	4	40	9	0,50	Červená	92 326
55.000.04.080	4	80	9	0,50	Červená	92 327
55.000.04.100	4	100	9	0,50	Červená	92 328
55.000.05.040	5	40	11	0,75	Bílá	92 329
55.000.05.080	5	80	11	0,75	Bílá	92 330
55.000.06.040	6	40	13	1,25	Modrá	92 331
55.000.06.080	6	80	13	1,25	Modrá	92 332
55.000.07.080	7	80	14	2,00	Žlutá	92 333

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/3	Viz. Níže

Testování: pohledem zkontrolujte, zdali u katétru s naplněným balónkem po předchozím přesném nastavení stříkačky nedochází k úniku tekutiny buď z balónku nebo jiné části katétru.

Upozornění: nenaplňujte balónek větším než maximálně doporučeným objemem tekutiny (MLV).

Naplnění tekutinou: naplňte stříkačku doporučené velikosti maximálním objemem dle hodnoty MLV, sterilním, s krví kompatibilním roztokem (např. fyziologickým roztokem). Odstraňte prostříknutím vzduch ze stříkačky a připojte stříkačku spojkou luer-uzávěr ke katétru. Pístem stříkačky natáhněte vzduch z balónku a katétru. Naplňte balónek malým objemem kapaliny a znovu vyprázdněte. Jemným poklepem odstraňte z katétru vzduch. Opakujte tento postup, dokud neodstraníte z katétru všechn vzduch. Před úplným naplněním balónku postupujte dle doporučených instrukcí pro vyzkoušení balónku.

Vyzkoušení balónku: pro optimální účinnost by měl být balónek vyzkoušen v následujícím pořadí úkonů po naplnění katétru kapalinou. Odpojte stříkačku od katétru a znovu nastavte objem kapaliny ve stříkačce podle maximálního objemu MLV. Připojte stříkačku koncovkou Luer. Naplňte a vyprázdněte balónek postupně ve třech krocích s vyšším objemem kapaliny při každém kroku (to zn. 50%, 75% a 100% doporučeného maximálního objemu kapaliny MLV). Při této zkoušce výše popsaným postupem aspirujte vzduchové bubliny.


Záruka: LMI ručí za odpovídající péči o své produkty během výroby. Záruka na výrobek se poskytuje v souladu s českým právním řádem. Nevztahuje se na škody vzniklé nesprávným zacházením a použitím.

Upozornění: stejně jako u veškeré katetrizace mohou nastat i zde komplikace. Medicínské stanovisko lékaře je jeho vlastní odpovědností.

1. Použití vysoce viskózních nebo koncentrovaných roztoků není doporučeno vzhledem k možnosti ucpání katétru.

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
EMBOLEKTOMICKÝ KATÉTR - JEDNOLUMENNÝ		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 3/3	Viz. Níže

- Balení je sterilní pouze při neporušeném a neotevřeném obalu. Znovu nesterilizujte. Katétr je určen výhradně pro jednorázové užití.
- Překročení největšího doporučeného objemu kapaliny velmi zvyšuje nebezpečí prasknutí balónku a poškození arterie.
- Katétr není vyroben ani doporučen pro endarterektomii, dilatační nebo okluzní výkony.
- Je třeba brát na vědomí možnost prasknutí balónku, zvláště pokud je použit vzduch, jako plnicí médium.
- Vzduch by neměl být použit pro naplnění balónku, pokud by v případě prasknutí způsobil vzduchovou embólii.
- Lékař musí správně posoudit objem naplnění balónku a tažnou sílu, aby zabránil poškození cévy, poškození její vnitřní stěny nebo disekci.

Plnicí tekutina: katétr by měl být před použitím prostříknut sterilní, s krví souhlasnou tekutinou (např. izotonický fyziologický roztok). Plyn nebo vzduch se nedoporučují.

Označení:

STERILE EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 DAHLHAUSEN®

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!