


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
Lina resterilizovatelné tužkové elektrody		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

Lina resterilizovatelné tužkové elektrody.

Katalogová čísla:

552-R-70
552-R-90
552-R – 125
553R-70
553-R-125-TU-A
554-R-3-120
554-R-5-120
E550-R-120
E550-R- 200

Návod k použití:

1. Lina elektrody 2,35mm je možné použít do 2,35mm kauterů.
2. Elektrody sterilizujte dle návodu uvedeného níže.
3. Vsuňte elektrodu do rukojeti.
4. Důležité: přesvědčte se, zda je elektroda zcela zasunutá v rukojeti.

Čištění a sterilizace:

A. Vyjměte elektrodu z rukojeti, umyjte v laboratorní myčce, opláchněte vlažnou vodou a naložte do roztoku nebo ultrazvukové lázně.

B. Sterilizace parou (autokláv) - balte jednotlivě

134 °C 3-18 min.

121 °C 15-30 min.

C. ETO sterilizace - balte jednotlivě

koncentrace ETO: 600 mg/l

teplota: 54 °C


relativní vlhkost: 40-60 %

doba působení: 1,45 hodiny nebo podobný standardní postup

Výrobce doporučuje po ETO sterilizaci následné osušení.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
Lina resterilizovatelné tužkové elektrody		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	Viz. níže

Výrobce nedoporučuje použít Lina resterilizovatelné elektrody více než 30x.

Loop elektrody nepoužívejte více než 5-10x.

Označení:

STERILE|EO

CE
0459

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Lina Medical CML ApS

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!