


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
INSUFLAČNÍ VERRES JEHLA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

Lina Verresova jehla slouží k vytvoření pneumoperitonea při miniinvazivních břišních výkonech.

katalogové číslo:	délka
6650 - 120	120 cm
6650 - 150	150 cm

Verresova jehla obsahuje tupý bezpečnostní mechanismus ovládaný pérem, který slouží k vytvoření pneumoperitonea před abdominální endoskopií. 14 G jehla z nerezového kovu přechází na proximální m konci v plastovou rukojeť. Tvar rukojeti je přizpůsoben pohodlnému užívání. Součástí rukojeti je uzávěr s Luer-lock konektorem pro insuflací dutiny břišní.

Návod k použití:


Ujistěte se, že je výrobek kompatibilní se všemi nástroji a veškerým příslušenstvím.

Připravte pacienta podle toho, jak to vyžaduje příslušná laparoskopická technika.

1. Sterilně vyjměte jehlu z obalu. Poškození jehly se vyhnete šetrným odložením na sterilní stolek.
2. Proveďte malou incizi, do které vsunete Verresovu jehlu. Držte jehlu mezi palcem a ukazováčkem a prostředníčkem podepřete zbytek rukojeti.
3. Při zavádění sledujte, zda se červený bezpečnostní indikátor pohybuje v čiré části rukojeti. Toto postavení značí retrakci tupého zavaděče a penetraci břišní stěny ostrou jehlou. Nepoužívejte jehlu, pokud bezpečnostní zavaděč není zasunut dovnitř jehly. Jakmile je zavaděč oprostěn od tlaku tkáně, vrací se červený bezpečnostní indikátor do zastíněné části rukojeti.
4. Odpovídajícím způsobem zkontrolujte, zda je Verresova jehla bezpečně zavedena v dutině břišní. Poté abdomen insufluje.
5. Po insuflacii na požadovaný tlak vyjměte jehlu a pokračujte ve výkonu.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
INSUFLAČNÍ VERRES JEHLA		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	Viz. níže

6. Nepoužívejte výrobek, pokud byl obal porušen. Nesterilizujte. Resterilizací může dojít k narušení integrity nástroje a jeho vadné funkci.

Kontraindikace:

Nepoužívejte, pokud jsou kontraindikovány miniinvazivní techniky.

Označení:



Datum revize textu: 01. 06. 2011

Výrobce:



Lina Medical CML ApS

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

www.linamedical.co

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!