

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
JEDNORÁZOVÉ ELEKTRODY PRO KAUTERY		Katalogové číslo
Chirurgie - CH	Počet stran: 1/2	Viz. níže

### Popis výrobku:


Jednorázové elektrody pro kautery.

### Katalogová čísla:

552-S-70	552-S-70-C	552-S-70-CI	552-S-90	552-S-125	552-S-125-C
552-S-125-CI	552-S-165	552-S-165-C	552-S-165-CI	552-S-200	552-S-200-C
552-S-200- CI	553-S-70	553-S-70-I	553-S-70-C	553-S-125-TU	553-S-70-TU
553-S-125	553-S-152-I	553-S-125-B	553-S-125-C	553-S-125-TU	553-S-165
553-S-165-C	553-S-165-CI	554-S-3-60	554-S-3-120	554-S-5-60	554-S-5-120
554-S-8-60	554-S-8-120	A-0102-S-195-LF	A0102-S-195-LR	A0204-S-130-LF	C1315-S-60
C1315-S-120	C1320-S-60	C1320-S-120	C1608-S-60	C1608-S-120	C1618-S-60
C1618-S-120	C2020-S-60	C2020-S-120	S0405-S-60	S0709-S-60	S1015-S-60
T1010-S-60	T1010-S-120	T1512-S-60	T1512-S-120	T2015-S-60	T2015-S-120
T2020-S-60	T2020-S-120	TS2115-S-60	U1210-S-60	U1210-S-120	U1512-S-60
U1512-S-120	U2013-S-110	U2015-S-60	U2015-S-110	U2015-S-120	U2020-S-60
U2020-S-120	U2715-S-60	U2715-S-120	US2013-S-60	US2013-S-110	UP2021-S-120

### Návod k použití:

1. Lina 2,35 mm elektrody lze použít pro 2,35 mm elektrochirurgické kautery.
2. Sterilně elektrodu rozbalte.
3. Zasuňte elektrodu do rukojeti kauteru
4. **Důležité:** Přesvědčte se, že je elektroda zcela zasunuta v kauteru.
5. Po použití elektrodu zahod'te.

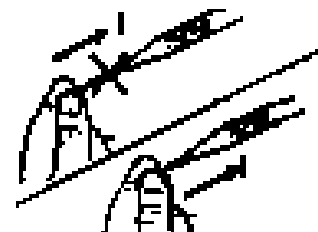

Označení:

STERILE EO

CE  
0459

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>JEDNORÁZOVÉ ELEKTRODY PRO KAUTERY</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	Viz. níže

**Výrobce:**



**Lina Medical CML ApS**

Formervangen 5

DK-2600 Glostrup

Denmark

[www.linamedical.co](http://www.linamedical.co)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ** , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**