


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
<b>Název výrobku:</b>		
<b>LAPAROSKOPICKÝ APLIKÁTOR</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Chirurgie - CH</b>	<b>Počet stran: 1/2</b>	G2LPC

**Popis výrobku:**

Aplikační katétr s koncovkou Luer, pro výhradní použití chirurgické lepidla GLUBRAN 2.  
Zavaděč (do 5mm portu)

**Návod:**

Aplikátor je určený pro aplikaci chirurgického lepidla GLUBRAN 2 při laparoskopickém výkonu. Výrobek je určen na jedno použití. Aplikátor lze použít pouze s 5mm trokarem. Celé zařízení je vloženo do trokaru, zkontrolujte kompatibilitu a těsnost. Napojte na injekční stříkačku s lepidlem, použijte stříkačku s Luer zámkem. Lepidlo nanášejte po kapkách. Po skončení lepení vyjměte aplikátor.

**Materiál:**

Polyethylen, eraclén, polyester PEBAX7233SA01, TERLUX 2802TR

**Kód:**

G2 LPC

**Sterilizace:**

Záření gama

**Trvanlivost:**

5 let

**Balení:**

Dvojitý sterilní obal

**Skladování:**


Přípravek uchovávat v původním obalu, na suchém místě při teplotě do 30°C

**Směrnice:**

MDD/93/42/EEC

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>LAPAROSKOPICKÝ APLIKÁTOR</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Chirurgie - CH	Počet stran: 2/2	G2LPC

**Třída:**

IIa.

**Balení:**

1 ks

**Označení:**

STERILE|EO

 0373

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**



**G.E.M.**

Via dei Campi, 2 - PO Box 427

Viareggio, LU, 55049

[www.gemitaly.it](http://www.gemitaly.it)

**Distributor:**

  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**