


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO – CENTRAL-GARD		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran:1/2	Viz. níže

Popis výrobku:


Semipermeabilní transparentní krytí. K fixaci periferních i centrálních venozních katétrů.

Katalogové číslo	Typ
49-668L	pro vena subclavia
49-667S	pro vena jugularis

Návod k použití:

Aplikujte dle přiloženého nákresu.

1. Sejměte náplast z podložky pomocí bílého proužku a zafixujte žilní katetr spodním okrajem rámu náplasti s výřezem.
2. Nalepte průhledné okénko náplasti tak, aby punkční bod zůstal viditelný, odstraňte pomocný bílý proužek.
3. Dle potřeby zafixujte jednotlivé lumen katetru.
4. Průhledné okénko náplasti je vyrobené z jednostranně prodyšného materiálu, umožňuje průnik páry z povrchu těla a zabraňuje tak maceraci kůže a přitom chrání punkční bod před vnějšími vlivy. Náplast je odolná vůči vodě.
5. Náplast můžete ponechat do 5 dnů. Poté sejměte, vyčistěte kůži a použijte novou fixaci.

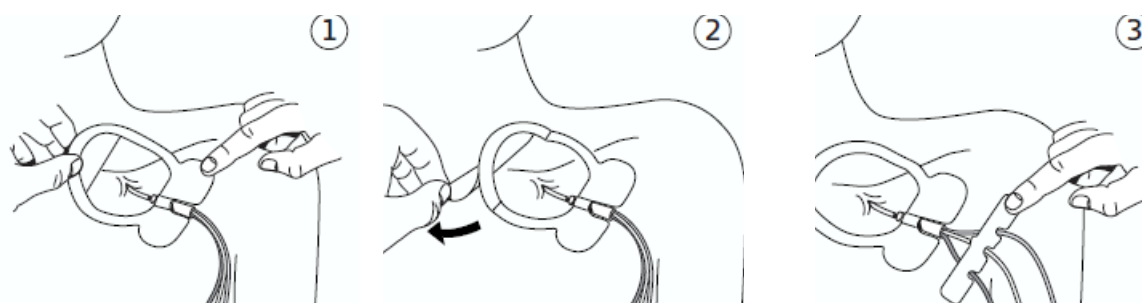


Upozornění:

Sterilní v případě nepoškozeného obalu.

Nepoužívejte po době expiraci.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO – CENTRAL-GARD		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran:2/2	Viz. níže

Balení:

25/250 ks

Označení:

STERILE R

CE
0120

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Unomedical

11-17 Wilmette Place

(PO Box 405)

Mona Vale NSW 2103

Australia

www.unomedical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!