


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNA MESH - SIS/ - SIS DIRECT		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:1/4	viz. níže

### Popis výrobku:

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/- SIS direct** je síťkový implantát pro zesílení struktur pojivových tkání a ligament.

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/-SIS direct** nemá vlastní farmakologické účinky a je netoxický.

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/-SIS direct** je upleten z neabsorbovatelného, bio-stabilního monofilního vlákna z polyvinyliden-fluoridu. Speciálně vyvinuté pletené struktury a ideální porozita sítě

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/-SIS direct** jsou optimálně přizpůsobené oblastem použití, pro které jsou určeny.

katalogové číslo:	Název výrobku	Rozměry (cm)
26.212.10.156	SIS	1,0 x 56
26.212.10.150	SIS direct	1,0 x 50
26.210.40.156	SIS PP	1,0 x 56
26.210.40.150	SIS DIRECT PP	1,0 x 50

### Příslušenství:

katalogové číslo:	název výrobku	Balení
26.200.00.001	Zavaděč pro suprapubický přístup	1 ks/bal.
26.200.00.002	Zavaděč pro transobturatorní přístup	1 ks/bal.
26.200.00.003	Zavaděč pro transobturatorní	standardní 1 set (L + P)/bal.
26.200.00.004	přístup, 1 pár (levý + pravý)	velký 1 set (L + P)/bal.

### Oblast použití:

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/-SIS direct** se používá k podpoře a stabilizaci struktur pojivové tkáně a ligament. Mezi běžné aplikace patří suburetrální nenapnuté smyčky pro léčení ženské stresové inkontinence plynoucí z uretrální hypermobility a/nebo z intrinsické deficience sfinkteru.


Chirurg zvolí operační metodu a polohu smyčky, při čemž obojí závisí jak na jeho/její preferenci, tak na použitých nástrojích. Tyto nástroje mohou být objednány zvlášť. Normálně je implantát umístěn vaginální nebo suprapubickou cestou. Výsledná pozice pásky je buď retrosymfyzární nebo je smyčka vnesena přes Foramen obturatum.

### Kontraindikace:

**DynaMesh<sup>®</sup>-SIS/-SIS direct** DynaMesh<sup>®</sup> se nemá používat tam, kde je přítomná infekce nebo v případě současného nebo zamýšleného těhotenství nebo u pacientů, u kterých je možný další růst.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNA MESH - SIS/ - SIS DIRECT		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:2/4	viz. níže

### Výstrahy:

Uživatel musí být obeznámen s technikou používanou při implantaci tahuprostých suburetrálních pásek **DynaMesh® SIS/-SIS direct**.

Pokud je **DynaMesh® SIS/-SIS direct** použit v kontaminované ráně, existuje možnost následné infekce, která si může vynutit odstranění materiálu.

Vsazení jehly může mít za následek poškození krevních cév, nervů, měchýře nebo střeva, což vyžaduje okamžitý chirurgický zásah.

Obecně platí, že použití pásky mohou vést k následujícím komplikacím: séromům, hematomům, infekcím, tvorbě píštělí, zánětům nebo arozm.

Až do implantace je nutno přísně dbát na zajištění sterilní manipulace. Implantát se smí aplikovat výhradně v aseptické místnosti.

Poškozené implantáty se nesmějí používat; zvláště pak je nutno vyhnout se kontaktu s ostrými předměty.

**DynaMesh® -SIS/-SIS direct** nesmí být implantován jestliže:

- Byla překročena minimální skladovací doba
- Jestliže je obal poškozen
- Jestliže jsou pochybnosti o jeho neporušenosti.

Implantát je zabalen ve dvojitým sterilním obalu. Vnitřní obal by neměl být otevřen dříve než je síťka připravena k použití. Doporučuje se, aby se se síťkou zacházelo výhradně ve sterilních, nepráškových rukavicích a s čistými nástroji.


Opakovaně použitelné nástroje musejí být před použitím zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou v perfektním stavu.

Chirurg je odpovědný za jakékoliv komplikace, které mohou být způsobeny nesprávnou indikací, nevhodnou operační technikou nebo chybou v udržování aseptických podmínek. Ve všech případech se doporučuje, aby byl zákrok doprovázen vhodným následným vyšetřením.

Překorigování smyčky může mít za následek pooperační problémy sahající od narušeného močení s močovým reziduem až po potlačení močení v důsledku napjatosti pásky.

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
DYNA MESH - SIS/ - SIS DIRECT		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:3/4	viz. níže

Pacient by měl být upozorněn na skutečnost, že fyzické činnosti, jako je zvedání těžkých břemen, jogging, jízda na koni nebo pohlavní styk by neměly být obnoveny dokud nebyl konzultován ošetřující lékař.

#### Vedlejší účinky:

V literatuře nejsou údaje o jakýchkoliv nežádoucích vedlejších účincích způsobených použitým polyvinyliden-fluoridem. Jako všechna cizí tělesa, **DynaMesh®-SIS/-SIS direct** může mít škodlivý účinek na pre-existující infekci a může vést k dočasnému lokálnímu podráždění.

#### Sterilita:

Výrobek je sterilizován etylén-oxidem.

**DynaMesh®-SIS/-SIS direct** nesmí být znovu sterilizován!

Výrobek nesmí být použit jestliže byl obal poškozen nebo již otevřen!

Každý výrobek, který byl otevřen a nebyl použit musí být vyřazen!

#### Podmínky skladování:

Doporučené podmínky skladování jsou následující:

- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě
- Chraňte před vlhkostí a vystavení přímému teplu
- Skladujte výhradně v původním balení
- Nepoužívejte jestliže prošla expirační doba!

#### Balení:

1ks

Označení:


STERILE|EO

 0481

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>DYNA MESH - SIS/ - SIS DIRECT</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Gynekologie - G</b>	<b>Počet stran:4/4</b>	viz. níže

**Výrobce:****FEG Textiltechnik**

Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Juelicher Strasse 338a

D-52070Aachen/Germany

[www.dyna-mesh.com](http://www.dyna-mesh.com)**Distributor:****Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**