


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PRSNÍ KLOBOUČKY PRO KOJÍCÍ MATKY		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:1/2	34.000.00.010

Popis výrobku:

Prsní kloboučky vyrobeny z čistého silikonu. Možnost opakované sterilizace, dezinfekce nebo vyváření.



Návod k použití:

1. Před použitím je vhodné prsní kloboučky řádně vyvařit.
2. Umyjte si ruce, vezměte prsní klobouček a navlhčete jej. Ohněte jeho okraj ven směrem k jeho sací části (obr. 1) a přiložte jej co možná nejtěsněji na bradavku.
3. Přitlačte okraj prsního kloboučku pevně k prsu, přičemž podepřete ňadro prsty. Jakmile začne dítě sát, zůstane prsní klobouček pevně na prsu.
4. Po kojení nechte nějakou dobu prsa nepokryta.

Zpočátku by jste měla Vaše dítě kojit častěji (asi každé 2 hod.), aby se prsa nezvětšila a tím nepopraskala pokožka, nebo nezpůsobovala dítěti potíže při kojení.

Čištění a ošetřování

1. Před a po každém použití je vhodné prsní kloboučky vyčistit. Díky speciálním vlastnostem silikonu, ze kterého jsou vyrobeny, je možné použít jakoukoliv čisticí nebo sterilizační metodu.
2. Vyváření je možné průběžně opakovat, aniž by došlo ke změně kvality nebo materiálu prsních kloboučků.
3. Osušené a čisté prsní kloboučky je vhodné uschovat zpět do krabičky.

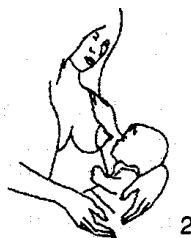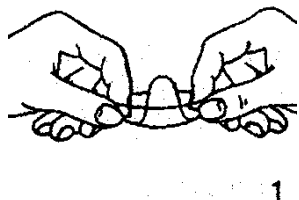


Balení:

1 pár

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PRSNÍ KLOBOUČKY PRO KOJÍCÍ MATKY		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:2/2	34.000.00.010

Označení:

C € 0123

HEM -3614- 8.3. 1994

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!