

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
H/S ELIPTOSFÉRICKÝ BALÓNKOVÝ KATETR		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:1/2	61- 4005

Popis výrobku:

Eliptosférický balónkový katetr pro hysterosonografii nebo hysterosalpingografii.

Návod k použití

1. Uchopte katetr v místě spojení obou lumen za modrou zužující se „kostku“.
2. Sejměte a znehodnoťte na konci zploštělý ochranný kryt špičky katétru.
3. Nafouknutím pomocí přiložené stříkačky zkontrolujte funkčnost balónku. Poté opět balónek úplně vyprázdněte.
4. Naplňte katetr kontrastním médiem (modrý lumen) bez přítomnosti vzduchu. Sejměte zaváděcí trubici z konce modré „kostky“ a nastavte konec katétru tak, aby jemně vyčníval koncem z distálního konce zaváděcí trubice.
5. Pomocí spekuly zpřístupněte děložní hrdlo a přiložte k němu konec zaváděcí trubice tak, aby špička katétru pronikla do děložního hrdla.
6. Znehybněte zaváděcí trubici a lehce vsuňte konec katétru zaváděcí trubici asi 1-2 cm do děložního hrdla. POMALU naplňte balónek buď vzduchem nebo fyziologickým roztokem a uzavřete tak atraumaticky děložní hrdlo. **Nenaplňujte balónek větším objemem, než je u přiložené stříkačky, tj. 1, 5cm³.**
7. V případě, že je potřeba docílit umístění balónku v děloze a uzavření hrdla „zevnitř“ vsuňte balónek do dělohy, naplňte ho na maximální objem, dosáhnete tak sférického tvaru, na rozdíl od předchozího eliptického, a lehce ho povytáhněte k sobě, než pocítíte odpor. Tak dosáhnete uzavření hrdla.
8. Vstříkněte kontrastní médium a dokončete vyšetření.
9. Nakonec vyprázdněte balónek a vyjměte katetr.

Označení:

STERILE | R

CE
0086


Balení:

1/40 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
H/S ELIPTOSFÉRICKÝ BALÓNKOVÝ KATETR		Katalogové číslo
Gynekologie - G	Počet stran:2/2	61- 4005

Výrobce:**Ackrad Laboriem**

Inc., Cranford,

NJ 07016

USA

Distributor:**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!