


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NAVLHČENÉ HYGIENICKÉ UBROUSKY		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran:1/2	75.990.00.002

Popis výrobku:

- jednorázové ubrousky
- ideální pro omývání pacientů
- bez alkoholu a lanolínu
- ph 5,5
- snižuje riziko kontaminace.
- zanechává pokožku čistou, svěží a voňavou

Návod k použití:

1. Odloupněte štítek pro otevření, aniž byste ho celý odstranili.
2. Pokud chcete ubrousky použít teplé, zahřejte celé balení v mikrovlnné troubě při 750W, nezahřívejte na více než 20 sekund.

Upozornění: Balení nesmí být rozpálené!

3. Štítek znovu zalepte, abyste udrželi teplotu ubrousků.
4. Při mytí jednoho pacienta spotřebujte celé balení.

Obsahuje:

- obsahuje vitamín E, provitamín B5 a přírodní extrakty.

Balení:

8 ubrousků


Krabice:

24 balení

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NAVLHČENÉ HYGIENICKÉ UBROUSKY		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran:2/2	75.990.00.002

Výrobce:**Britts Care B.V.**

Molenvlietlaan 12

3271 BM Mijnsheerenland

Nizozemí

www.britts-care.com**Distributor:****Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!