


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NAVLHČENÁ HYGIENICKÁ ŽÍNKÁ		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran:1/2	75.990.00.003

Popis výrobku:

- jednorázové žínky
- ideální pro omývání pacientů
- bez alkoholu a lanolínu
- ph 5,5
- snižuje riziko kontaminace
- **zanechává pokožku čistou, svěží a voňavou**


Návod k použití:

1. Odloupněte štítek pro otevření, aniž byste ho celý odstranili.

Pokud chcete žínky použít teplé, zahřejte celé balení v mikrovlnné troubě při 750 W, nezahřívajte na více než 20 sekund.

Upozornění: Balení nesmí být rozpálené!

2. Štítek znovu zalepte, abyste udrželi teplotu žínek.
3. Při mytí jednoho pacienta spotřebujte celé balení

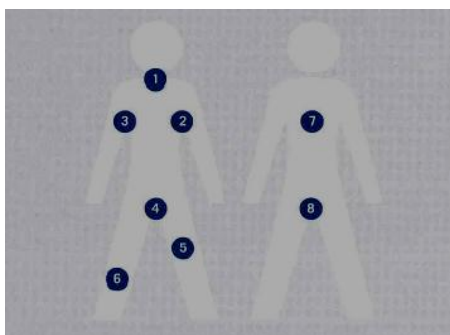

1. obličej, krk, trup
2. levá ruka, podpaždí
3. pravá ruka, podpaždí
4. intimní zóna
5. levá noha
6. pravá noha
7. záda
8. hýždě

Obsahuje:


- obsahuje vitamín E, pro-vitamín B5 a přírodní extrakty.

Balení:

8 žínek

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NAVLHČENÁ HYGIENICKÁ ŽÍNKÁ		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran:2/2	75.990.00.003

Krabice:

24 balení

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:**Britts Care B.V.**

Molenvlietlaan 12

3271 BM Mijnsheerenland

Nizozemí

www.britts-care.com**Distributor:****Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!