


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>HYGIENICKÁ ČEPICE S PŘÍDAVKEM ŠAMPONU</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Hygiena - H</b>	<b>Počet stran:1/2</b>	75.990.00.004

**Popis výrobku:**

- jednorázová čepice
- ideální pro omývání pacientů
- časově úsporné, jemná a lehká
- šampon bez vody
- absorbuje usazeniny, sekrece a špínu.
- **zanechává vlasy čisté, svěží a voňavé**
- **pomáhá pacientům cítit se a vypadat lépe**

**Návod k použití:**

1. Pokud chcete čepici použít teplou, zahřejte celé balení v mikrovlnné troubě při 750 W, nezahřívejte na více než 20 sekund.

**Upozornění: Balení nesmí být rozpálené!**

2. Otevřete balení a nasad'te čepici s přídatkem šamponu přes vlasy.
3. Masírujte do pokožky hlavy po dobu dvou minut a poté čepici sejměte.
4. V případě nutnosti vysušte ručníkem a vlasy učešte.

**Obsahuje:**

- jednofázový šamponový systém s uklidňujícím alantoinem

**Balení:**

1 čepice


**Krabice:**

20 balení

**Revize č. 1 :22.9.2011**

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
<b>Název výrobku:</b>		
<b>HYGIENICKÁ ČEPICE S PŘÍDAVKEM ŠAMPONU</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Hygiena - H</b>	<b>Počet stran:2/2</b>	75.990.00.004

**Výrobce:**



**Britts Care B.V.**

Molenvlietlaan 12

3271 BM Mijnsheerenland

Nizozemí

[www.britts-care.com](http://www.britts-care.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**