

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÁ ČEPICE S PŘÍDAVKEM ŠAMponU		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran: 1/2	75.990.00.005

Popis výrobku:

- jednorázová čepice
- ideální pro omývání pacientů
- časově úsporné, jemná a lehká
- šampon bez vody
- absorbuje usazeniny, sekrece a špínu.
- **zanechává vlasy čisté, svěží a voňavé**
- **pomáhá pacientům cítit se a vypadat lépe**
- vhodné pro infekční pacienty, zejména s MRSA

Návod k použití:

1. Pokud chcete čepici použít teplou, zahřejte celé balení v mikrovlnné troubě při 750 W, nezahřívejte na více než 20 sekund.

Upozornění: Balení nesmí být rozpálené!

2. Otevřete balení a nasadte čepici s přídatkem šamponu přes vlasy.
3. Masírujte do pokožky hlavy po dobu dvou minut a poté čepici sejměte.
4. V případě nutnosti vysušte ručníkem a vlasy učešte.

Obsahuje:

- jednofázový šamponový systém s uklidňujícím alantoinem

Balení:

1 čepice

Krabice:

20 balení

Datum revize textu: 01. 06. 2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÁ ČEPICE S PŘÍDAVKEM ŠAMPONU		Katalogové číslo
Hygiena - H	Počet stran:2/2	75.990.00.005

Výrobce:



Britts Care B.V.

Molenvlietlaan 12

3271 BM Mijnsheerenland

Nizozemí

www.britts-care.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!